

Becht XL Wipes plus

Vorgetränkte Desinfektionstücher

Anwendungsbereich

Vorgetränkte Tücher für die Wischdesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten, z.B. Behandlungsstühle, Schwebetische, Handstücke etc. zwischen dem Patientenwechsel.

Anwendung

Beutel in ein ausreichend großes Behältnis stellen (z.B. Becht-Spenderbox. REF 530). Unterhalb der Schweißlinie abschneiden. Mit dem ersten Tuch den Deckel und die Abreißvorrichtung desinfizieren. Danach das Tuch aus der Mitte der Rolle durch die Deckelöffnung ziehen. Zur Desinfektion die zu desinfizierenden Flächen und Gegenstände vollflächig einreiben und die Flüssigkeit einwirken lassen. Einwirkzeiten beachten. Nicht nachwischen. Spenderbox nach Entnahme eines Tuches immer sofort verschließen.

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- wirkt bakterizid (einschl. MRSA) und levurozid in 1 Minute unter hoher organischer Belastung (EN 13727/13624)
- **erfolgreich getestet im 4-Felder-Test nach EN 16615**
- inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-Viren in 1 Minute (EN 14476)
- wirkt tuberkulozid (*M.terrae*) in 5 Minuten (EN 14348)
- inaktiviert HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia-Viren in 1 Minute (EN 14476)
- besonders weiches, saugfähiges und reißfestes Vlies
- hohes Wiederabgabevermögen der Flüssigkeit auf die zu desinfizierende Fläche
- erfolgreich im Röhmtest auf Plexiglas
- mit angenehmem Lemonduft
- Tränkflüssigkeit: 2,1 l Bechtozid plus (VAH-gelistet)
- gute Materialverträglichkeit
- Tuchgröße: 28 x 30 cm
- Gewicht: 50 g/qm



Zusammensetzung der Tränkflüssigkeit

100 g Lösung enthalten:

- 250 mg Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-Chlorid
- 250 mg Didecyldimethylammonium-Chlorid
- 250 mg C12-14 Alkyl[(ethylphenyl) methyl]dimethyl-Chlorid
- 20 g Ethanol
- 9,95 g 1-Propanol

Lieferform

REF 530.90L Beutel mit 90 Stück Inhalt

REF 530 plus Becht-Spenderbox für Becht XL Wipes

Haltbarkeit

30 Monate

Klassifizierung

Medizinprodukt, Klasse IIa, Regel 15,
CE Certificate: G1 17 09 49628 010,
TÜV SÜD Product Service GmbH, München

Hersteller

Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg
Tel.: +49 781 60586-0
Fax.: +49 781 60586-40
www.becht-online.de