

# BLUE ETCH Ätzel

## Produktbeschreibung:

*BLUE ETCH* Ätzel ist ein 36%-iges Phosphorsäureätzel. Es beseitigt die präparationsbedingte Schmierschicht, schafft mikrofeine Retentionen im Zahnschmelz und legt die Dentinkanälchen frei. Dadurch wird die Haftung des Bondings an Zahnschmelz und Dentin ermöglicht.

*BLUE ETCH* wurde mit optimalen Thixotropie- und Fließeigenschaften entwickelt. Das Gel kann sehr präzise appliziert werden.

## Anwendungsgebiete:

Ätzen von Zahnschmelz und Dentin

## Vorsichtsmaßnahmen:

Der Kontakt von Ätzel mit Schleimhaut, Haut und Augen ist zu vermeiden. Erfolgt versehentlich doch ein Kontakt, dann sind die benetzten Stellen so schnell wie möglich mit Wasser abzuspolen.

## Anwendung:

Zahn vor der Behandlung mit fluoridfreier Polierpaste sorgfältig reinigen. Nach der Präparation die Kavität abspülen und trocknen. Die Verwendung von Kofferdam wird empfohlen. Pulpa in tiefen Kavitäten schützen (z.B. mit einer dünnen Schicht eines geeigneten Unterfüllungsmaterials bedecken). Ätzel applizieren. Empfohlene Einwirkzeit: 20 – 45 sek. auf Zahnschmelz, 10- 15 sek. auf Dentin. Mindestens 20 sek. lang mit Wasser spülen. Mit öl- und wasserfreier Druckluft trocknen. Die angeätzte Fläche darf bis zum Fortgang der Behandlung nicht berührt oder durch Speichel kontaminiert werden. Der geätzte Schmelz sollte kreidig weiß aussehen, andernfalls den Ätzelvorgang wiederholen. Weitere Versorgung mit Haftvermittler und Composit laut Herstellerangaben.

Spritze stets nach Gebrauch verschließen. Nicht über 28°C lagern. Nach Ablauf des Verfallsdatums das Material nicht mehr verwenden. Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß Gebrauchsinformation angewendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßer Anwendung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Produkt eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nur für zahnärztlichen Gebrauch!

**PRODENT Dentalbedarf GmbH**

Nicolaus-Zech-Straße 36

D-96450 Coburg

Fon: +49 (0) 9561 - 31880

Fax: +49 (0) 9561 - 318810