

1

Kappe von der Spritze abnehmen und eine SofNeedle™ Schaumstoffspitze sicher befestigen.

2

Um die Behandlung für den Patienten angenehmer zu machen, die Spritze auf Körpertemperatur erwärmen. Hierzu die Spritze ca. 10 Sekunden unter fließendes Wasser halten.

3

WICHTIG! Um die Spritze präzise bedienen zu können, die Spritze in der Handfläche halten. Den Kolben mit dem Daumenballen hereindrücken. Den Kolben NICHT mit der Daumenspitze hereindrücken.

4

Den Spritzenfluss überprüfen. Vor der intraoralen Verwendung auf einem Tupfer testen. Den Inhalt der Spritze mit langsamem, gleichmäßigem Druck ausdrücken, um die Schaumstoffspitze zu befeuchten.

5

Die Dentinfläche 20 Sekunden lang vorsichtig einreiben, bis diese gesättigt ist. Der Bereich muss gut gesättigt sein. D/Sense Crystal kann auf feuchtes oder trockenes Dentin angewendet werden.

6

Die Fläche 30 Sekunden mit einem leichten Luftstrom trocknen. Wenn keine Druckluft verwendet wird, den Bereich 2 Minuten lufttrocknen lassen. Es ist ein frostig weißes Präzipitat zu erkennen.

7

Das oben beschriebene Verfahren kann bei Bedarf wiederholt werden. SofNeedle nach Gebrauch entsorgen. Spritze wieder mit der Kappe verschließen.