

Flexio-Bohrerstände 39

Gebrauchsanleitung



Deutsch



Erklärung der Hinweissymbole:

-  = WARNUNG! Missachtung kann zu Personenschäden führen.
-  = VORSICHT! Missachtung kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
-  = HINWEIS! Missachtung kann zur Fehlfunktion führen.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Warnungen in der Gebrauchsanweisung des Reinigungs- und Desinfektionsautomaten. Bereiten Sie ausschließlich Dentalinstrumente/Medizinprodukte auf, die von ihrem Hersteller als maschinell wiederaufbereitbar deklariert sind und beachten Sie dessen spezifische Aufbereitungshinweise. Das verwendete Aufbereitungsprogramm mit bevorzugt thermischer Desinfektion muss gegebenenfalls auf die Materialqualität der Instrumente abgestimmt sein.

Lieferumfang



Art.-Nr.	Anzahl	Beschreibung
105 085	4 Stück	Flexio-Bohrerstände mit 39 Steckplätzen L x B x H: 5,5 x 3,9 x 3,3 cm
	1 Stück	Halterung Bohrerstände L x B x H: 18,7 x 5,7 x 4,0 cm

Anwendungsgebiet

Der Flexio-Bohrerstände 39 ist aus robustem Edelstahl gefertigt und wird mit 4 Ständern und 1 Halterung angeboten - für das Einbringen von bis zu 156 Instrumenten.

Der Flexio-Bohrerstände wird mit bis zu 39 Bohrern befüllt. Jeder Bohrerstände verfügt über 21 große Aufnahmen und 18 kleine Aufnahmen, die sich für Bohrerchaftdurchmesser von 1,59mm und 2,5mm sowie Schafthöhen von 18,5 mm bis 27,5 mm eignen. Nach der Bestückung kann die Aufbereitung der Instrumente in vielen Thermodesinfektoren erfolgen.

Anwendung:

-  Die Bohrerstände dürfen nur mit der Halterung in einem Thermodesinfektor aufbereitet werden.
-  Bei Bohrern mit besonders komplexen Funktionsenden bzw. hartnäckigen Anhaftungen, kann eine Ultraschallbad-Vorbehandlung erforderlich sein.

Die Bohrer werden mit dem Schaftende nach unten in die jeweiligen Aufnahmen gesteckt.

-  Vor und Nach der Aufbereitung der Instrumente muss das Schaftende desinfiziert werden.
-  Die Funktionsenden der Instrumente müssen nach oben zeigen.
-  Verletzungsgefahr: Achten Sie beim Einsetzen der Instrumente darauf, sich nicht an den Funktionsenden der Instrumente zu verletzen. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit beim Einsortieren stichhemmende Handschuhe.
-  Die verwendeten Bohrer müssen vom Hersteller für die maschinelle Aufbereitung in einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät freigegeben sein.
-  Vergewissern Sie sich, dass die Instrumente korrekt positioniert und fixiert sind. Instrumente, die während der maschinellen Aufbereitung herausgefallen sind, müssen noch einmal aufbereitet werden. Zudem können herausgefallene Bohrer Ihrem Reinigungs- und Desinfektionsgerät schaden.

Die bestückten Bohrerstände bringen Sie in die Halterung ein.

Jetzt ist der Bohrerstände bereit zur Reinigung und Desinfektion

IC Medical GmbH

Schorndorfer Straße 67
73635 Rudersberg-Steinberg

Telefon: +49 7181-70 60-0
Telefax: +49 7181-70 60-99
E-Mail: info@icmedical.de

www.icmedical.de