

Flexio-Gewindekopplung M8x1

Gebrauchsanleitung

icmedical

Deutsch




Anwendungsgebiet

Die Flexio-Gewindekopplung M8x1 dient als Zwischenstück für die Adaption von Cavitron- und ZEG-Adapter.


Anwendung:

Die Flexio-Gewindekopplung M8x1 findet Anwendung als Zwischenstück für Cavitron- und ZEG-Adapter, passend für M8 Gewindeaufnahmen auf Injektionsschienen.




Die Gewindekopplung mit dem Gewindeende in das M8-Gewinde der Injektionsschiene eindrehen. Erst wenn die Gewindekopplung fest auf dem Gewinde sitzt können die Adapter aufgesteckt werden.

-  Vor und Nach der Aufbereitung der Instrumente muss das Schaftende desinfiziert werden.
-  Beim Aufstecken der Adapter auf die Gewindekopplung merken Sie einen leichten Widerstand. Fehlt der Widerstand, ist der Adapter nicht richtig montiert.
-  Vorsicht, Verletzungsgefahr: Beachten Sie beim Aufstecken und beladen der jeweiligen Adapter die dazugehörige Bedienungsanleitung

Vergewissern Sie sich, dass die Adapter und Instrumente korrekt positioniert und fixiert sind.

-  Instrumente, die während der maschinellen Aufbereitung herausgefallen sind, müssen nochmals aufbereitet werden.

Erklärung der Hinweissymbole:

-  = WARNUNG! Missachtung kann zu Personenschäden führen.
-  = VORSICHT! Missachtung kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
-  = HINWEIS! Missachtung kann zur Fehlfunktion führen.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und Warnungen in der Gebrauchsanweisung des Reinigungs- und Desinfektionsautomaten. Bereiten Sie ausschließlich Dentalinstrumente/Medizinprodukte auf, die von ihrem Hersteller als maschinell wiederaufbereitbar deklariert sind und beachten Sie dessen spezifische Aufbereitungshinweise. Das verwendete Aufbereitungsprogramm mit bevorzugt thermischer Desinfektion muss gegebenenfalls auf die Materialqualität der Instrumente abgestimmt sein.

Lieferung Komponenten

Art.-Nr.	Abb.	Beschreibung
105 140		Flexio-Gewindekopplung M8x1 für M8 Gewindeaufnahmen auf Injektionsschienen. Inhalt: 1 Adapter

IC Medical GmbH

Schorndorfer Straße 67
73635 Rudersberg-Steinberg

Telefon: +49 7181-70 60-0
Telefax: +49 7181-70 60-99
E-Mail: info@icmedical.de

www.icmedical.de