





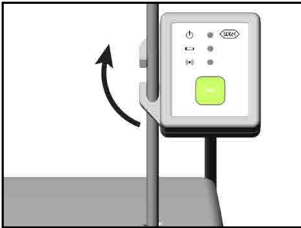
# Stručný návod pro SPI-Dongle

## Připojení / odpojení SPI-Dongle

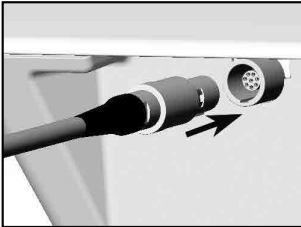


 Dbejte na správnou polohu!

❶ Připojte SPI-Dongle k řídicí jednotce nebo SPI-Dongle odpojte od řídicí jednotky.



❷ Připevněte SPI-Dongle na stativ nebo SPI-Dongle sejměte ze stativu.

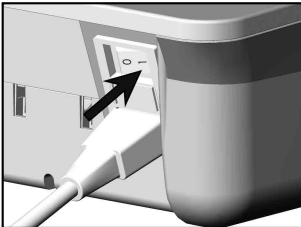

❸ Zapněte řídicí jednotku síťovým vypínačem.

# Stručný návod pro SPI-Dongle

## Současné použití několika řídicích jednotek W&H

Stiskněte oranžové tlačítko nožního ovládání S-NW na 3 sekundy, abyste přepnuli mezi jednotlivými řídicími jednotkami.

### ZELENÁ – SPI-Dongle aktivován

LED svítí, když je SPI-Dongle připojen a řídicí jednotka je zapnutá.

### ORANŽOVÁ – Baterie

LED bliká, když je nutné vyměnit baterie nožního ovládání.

### MODRÁ – Párování (Pairing)



Nožní ovládání S-NW a SPI-Dongle jsou v expedičním stavu spárované!

Při aktivním párování: LED bliká

Při neaktivním párování:

- 1 Stiskněte na 4 sekundy knoflík na SPI-Dongle.
- 2 LED bliká. SPI-Dongle je na 30 sekund v režimu párování.
- 3 Stiskněte na minimálně tři sekundy současně oranžové a zelené tlačítko nožního ovládání S-NW.
- 4 LED po úspěšném párování třikrát blikne.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0  
f + 43 6274 6236-55  
office@wh.com wh.com

