





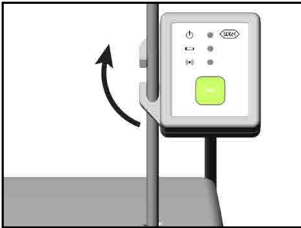
Guida rapida per il dongle SPI

Inserimento / estrazione del dongle SPI

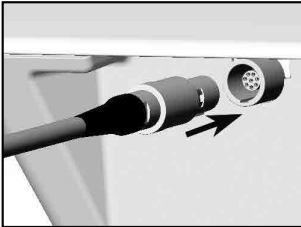


 Prestare attenzione alla disposizione!

❶ Inserire il dongle SPI oppure staccare il dongle SPI dall'unità di controllo.



❷ Agganciare il dongle SPI sullo stativo oppure sganciare il dongle SPI dallo stativo.

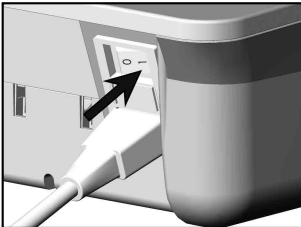

❸ Accendere l'unità di controllo usando l'interruttore principale.

Guida rapida per il dongle SPI

Utilizzo contemporaneo di più unità di controllo W&H

Premere per tre secondi il tasto arancione del controllo al piede S-NW per passare da un'unità di controllo a un'altra.

VERDE – dongle SPI attivato

Il LED si accende quando il dongle SPI viene inserito e l'unità di controllo viene accesa.

ARANCIONE – Batteria

Il LED lampeggia quando le batterie del controllo al piede devono essere sostituite.

BLU – Abbinamento (pairing)



Il controllo al piede S-NW e il dongle SPI forniti in dotazione sono già abbinati!

Se l'abbinamento è attivato: il LED lampeggia

Se l'abbinamento non è attivato:

- 1 Premere il tasto sul dongle SPI per 4 secondi.
- 2 Il LED lampeggia. Il dongle SPI resta per 30 secondi nella modalità abbinamento.
- 3 Premere contemporaneamente per almeno tre secondi i tasti arancione e verde del controllo al piede S-NW.
- 4 Il LED lampeggia tre volte dopo un abbinamento avvenuto correttamente.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com

