





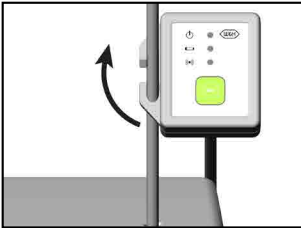
# Beknopte handleiding voor SPI-dongel

## SPI-dongel aansluiten / afnemen

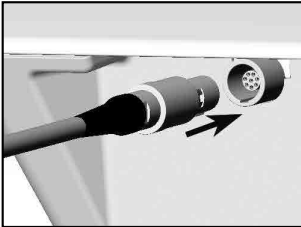


 Let op de plaatsing!

❶ Sluit de SPI-dongel aan of scheid de SPI-dongel van de besturing.



❷ Zet de SPI-dongel vast op het statief of neem de SPI-dongel van het statief af.

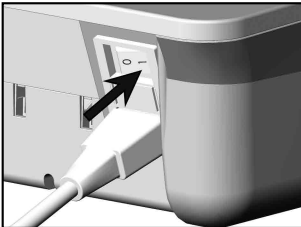

❸ Schakel de besturing in met de netschakelaar.

# Beknopte handleiding voor SPI-dongel

## Gelijktijdig gebruik van meerdere W&H-besturingen

Bedien de oranje toets van pedaal S-NW 3 seconden om tussen de afzonderlijke besturingen te schakelen.

### GROEN - SPI-dongel geactiveerd

LED brandt als de SPI-dongel is aangesloten en de besturing is ingeschakeld.

### ORANJE - batterij

LED knippert als de batterijen van het pedaal moeten worden vervangen.

### BLAUW - koppeling (pairing)



Het pedaal S-NW en de SPI-dongel zijn bij de levering gekoppeld!

Bij een actieve koppeling: LED knippert

Bij een inactieve koppeling:

- 1 Druk de knop op de SPI-dongel 4 seconden in.
- 2 LED knippert. De SPI-dongel bevindt zich 30 seconden in de koppelingsmodus.
- 3 Bedien minimaal drie seconden tegelijkertijd de oranje en groene toets van pedaal S-NW.
- 4 LED knippert drie keer na een succesvolle koppeling.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0  
f + 43 6274 6236-55  
office@wh.com wh.com

