





Краткое руководство к электронному защитному ключу-заглушке SPI

Установка/извлечение электронного защитного ключа-заглушки SPI

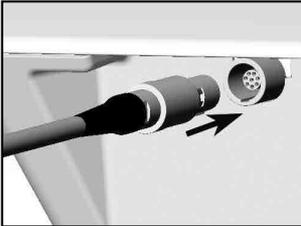


 Соблюдайте корректное положение!

- 1 Вставьте электронный защитный ключ-заглушку SPI или отсоедините электронный защитный ключ-заглушку SPI от блока управления.

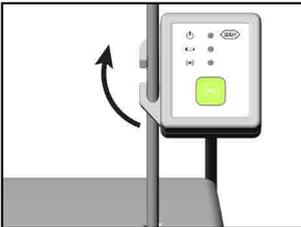

- 2 Зафиксируйте электронный защитный ключ-заглушку SPI на штативе или отсоедините электронный защитный ключ-заглушку SPI от штатива.

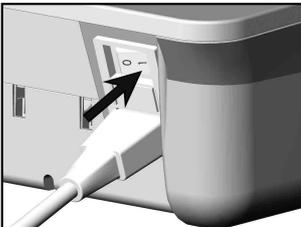

- 3 Включите блок управления с помощью сетевого выключателя.

Краткое руководство к электронному защитному ключу-заглушке SPI

Одновременное использование блоков управления W&H

Нажимайте оранжевую кнопку блока ножного управления S-NW в течение 3 секунд для переключения между отдельными блоками управления.

ЗЕЛЕНЫЙ светодиод — электронный защитный ключ-заглушка SPI активирован

Светодиод горит, когда электронный защитный ключ-заглушка SPI вставлен и блок управления включен.

ОРАНЖЕВЫЙ светодиод — батарейка

Светодиод мигает, если батарейки блока ножного управления необходимо заменить.

СИНИЙ светодиод — сопряжение (Pairing)



В состоянии при поставке блок ножного управления S-NW и электронный защитный ключ-заглушка SPI соединены!

При активном сопряжении: светодиод мигает.

При неактивном сопряжении

- 1 Нажимайте кнопку на электронном защитном ключе-заглушке SPI в течение четырех секунд.
- 2 Светодиод мигает. Электронный защитный ключ-заглушка SPI в течение 30 секунд находится в режиме сопряжения.
- 3 Одновременно нажимайте оранжевую и зеленую кнопки блока ножного управления S-NW в течение по меньшей мере трех секунд.
- 4 После успешного завершения сопряжения светодиод трижды мигнет.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria

t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com

