


## Navodila za uporabo

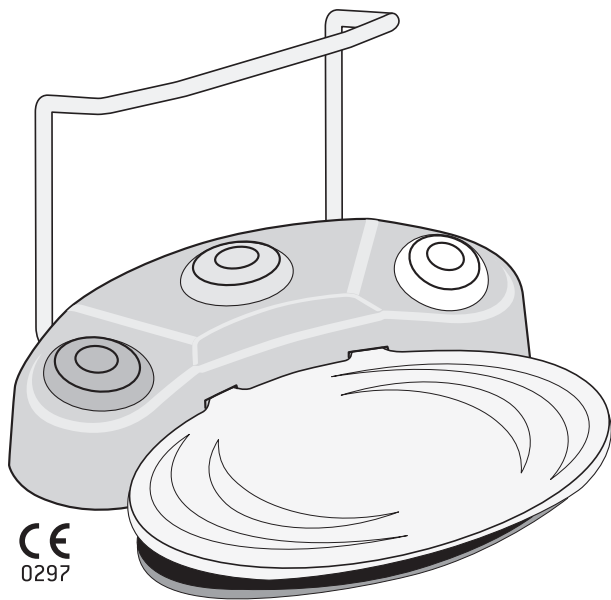

CE  
0297

**Nožni krmilnik  
variabilno**

**S-N1**

# Kazalo

---

<b>Simboli W&amp;H</b> .....	3
<b>1. Uvod</b> .....	4 – 6
<b>2. Obseg dobave</b> .....	7
<b>3. Montaža / snetje ročaja</b> .....	8
<b>Garancijska izjava</b> .....	10
<b>Pooblaščen servisni partnerji W&amp;H</b> .....	11

# Simboli W&H

---

Simboli v navodilih za uporabo



**OPOZORILO!**  
(če obstaja nevarnost  
telesnih poškodb)




**POZOR!**  
(če obstaja nevarnost  
poškodovanja stvari)



Splošna pojasnila,  
brez nevarnosti za človeka ali stvari

# 1. Uvod

---

 Politika kakovosti je pri W&H oblikovana tako, da je zadovoljstvo strank vselej na prvem mestu. Predstavljeni izdelek W&H je bil razvit, izdelan in preizkušen v skladu z veljavnimi zakonskimi in normativnimi predpisi.



## **Nožni krmilnik lahko uporabljate le**

- > z vrstami naprav, navedenimi v teh navodilih za uporabo
- > skladno z navodili za uporabo posameznih pogonskih enot



## **Upoštevajte naslednja poglavja navodil za uporabo posameznih pogonskih enot:**



- > Simboli
- > Uvod
- > Varnostna opozorila
- > Zagon
- > Opis / Upravljanje z nožnim krmilnikom
- > Higijena in nega
- > Pribor
- > Servis
- > Tehnični podatki
- > Recikliranje in odstranjevanje


# Uvod


---

## Namen uporabe

Variabilen nožni krmilnik za uporabo pri napravah z mehansko pogonsko enoto.

  Uporaba, ki ni v skladu z namembnostjo, lahko privede do poškodb nožnega krmilnika ter s tem povzroči tveganje in nevarnost za bolnike, uporabnike in druge osebe.

 **Nestrokovna uporaba**  
Zaradi nestrokovne uporabe in nedovoljenega načina montaže, spremembe oz. popravila nožnega krmilnika ali neupoštevanja naših navodil preneha veljati garancija, upravičeni pa niste niti do nobenih drugih zahtevkov.

 **Nožni krmilnik**  
Nožni krmilnik je v skladu z IEC 60601-1 / ANSI/AAMI ES 60601-1 primeren za uporabo v območju M (AP).  
Območje M obsega piramidni stožec pod operacijsko mizo, ki je za 30° nagnjen navzven.

**Območje M**, označeno tudi kot »medicinsko okolje«, zajema del prostora, v katerem lahko zaradi uporabe analgetičnih sredstev ali medicinskih sredstev za čiščenje kože oziroma dezinfekcijo – četudi samo v majhnih količinah in za kratek čas – nastane eksplozivno ozračje.

# Uvod



## Izdelava po smernici EU

Nožni krmilnik je medicinski izdelek, izdelan po direktivi EU 93/42/EGS, in je združljiv s spodaj navedenimi pogonskimi enotami.

Vrsta	Opis
SI-95	Implantmed, DU900, OsseoSet™ 100, Frios® Unit S
SA-200 / SA-200 C	Elcomed
SI-923, SI-915	Implantmed, BTI DrillTech®, Implant Unit, Ism, Surgical Motor System, OSM2, MIS MCU, DU1000, Frios® Unit S/i, OsseoSet 200, Osscora Surgical set
SA-310	Elcomed
PA-123 / PA-115	Tigon+



## Odgovornost izdelovalca

Proizvajalec je odgovoren za učinke na varnost, zanesljivost in delovanje nožnega krmilnika samo v primeru, da je bila naprava uporabljena v skladu z naslednjimi navodili:

- > Nožni krmilnik uporabljajte skladno s temi navodili za uporabo in z navodili za uporabo posameznih pogonskih enot.
- > Nožni krmilnik ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih lahko uporabnik popravil sam. Spremembe ali popravila smejo izvajati samo pooblaščen servisni partnerji podjetja W&H (glejte stran 11).
- > Zaradi nedovoljenega odpiranja nožnega krmilnika prenehajo veljati garancijske in druge jamstvene pravice.

## 2. Obseg dobave

**Vrste SI-95** (Implantmed, DU900, OsseoSet™ 100, Frios® Unit S)

**Vrste SA-200, SA-200 C** (Elcomed)

Nožni krmilnik S-N1, REF 05083300

**Vrste SI-923, SI-915** (Implantmed REF 00900100 / 00900101 / 00900102 / 00900103 / 00900104 / 00900105 / 00900106 / 00900107, BTI DrillTech®, Implant Unit, Ism, Surgical Motor System, OSM2, MIS MCU, DU1000, Frios® Unit S/i, OsseoSet 200, Osscora Surgical set)

Nožni krmilnik S-N1, REF 05046200

**Vrsta SA-310** (Elcomed)

**Vrste SI-923, SI-915** (Implantmed REF 16929000 / 16929001)

Nožni krmilnik S-N1, REF 06202400


**Vrste PA-123, PA-115** (Tigon+)

Nožni krmilnik S-N1, REF 06382200

**Za vse navedene vrste**

Ročaj, REF 04653500


### 3. Montaža / snetje ročaja

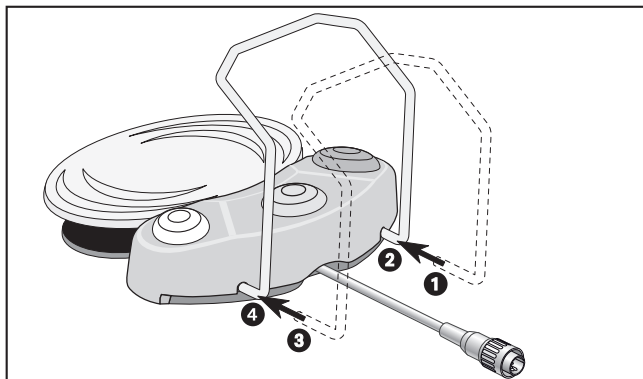

#### Montaža ročaja

 Nožni krmilnik zavrtite za 180°.

- 1 Vodilo omejila namestite v odprtino nožnega krmilnika.
- 2 Ročaj potisnite do omejila.
- 3 Namestite še drugo vodilo omejila v odprtino nožnega krmilnika.
- 4 Ročaj potisnite do omejila.

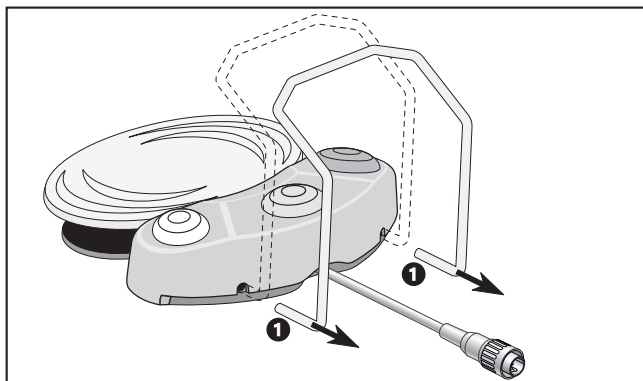

#### Snetje ročaja

- 1 Izvlecite ročaj.





# Garancijska izjava

Ta W&H produkt so z največjo skrbnostjo izdelali visoko kvalificirani strokovnjaki. Različni preizkusi in kontrole zagotavljajo brezhibno delovanje. Ne pozabite, da so garancijski zahtevki veljavni le ob upoštevanju vseh navodil v priloženih Navodilih za uporabo.

**W&H kot proizvajalec jamči, da je izdelek brez napak v materialu in izdelavi od dne nakupa do preteka garancijskega roka v trajanju dvanajst mesecev.**

Ne jamčimo za škodo zaradi nestrokovnega ravnanja ali pri popravilih s strani W&H nepooblaščenih tretjih!

Garancijske zahtevke – ob predložitvi računa – je treba dostaviti dobavitelju ali enemu izmed pooblaščenih servisnih partnerjev W&H. Opravljanje garancijske storitve ne podaljšuje niti garancijskega niti morebitnega jamstvenega roka.

**12** mesečna garancija

## Pooblaščeni servisni partnerji W&H

---

Obiščite spletno stran podjetja W&H na <http://wh.com>.

Pod postavko menija »Service« (Servis) najdete svojega najbližjega pooblaščenega servisnega partnerja W&H.

Če nimate dostopa do interneta, se obrnite na

**W&H Dentalmechanik GmbH**, Ignaz-Glaser-Straße 60, A-5111 Bürmoos

t + 43 6274 6236-239, f + 43 6274 6236-890, E-Mail: [service.dept@wh.com](mailto:service.dept@wh.com)

**Proizvajalec**

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, **Austria**

**t + 43 6274 6236-0,      f + 43 6274 6236-55**  
**office@wh.com          wh.com**

Form-Nr. 50587 ASI

Rev. 001 / 16.01.2012

Pridržujemo si pravico do sprememb

