

So wird Glu/Sense angewendet:

Kit mit Spritze:

1

Kappe von der Spritze entfernen und eine SofNeedle®-Applikationsspitze aufdrehen.

2

Die Spitze für den Zugang zum Anwendungsbereich nach Bedarf biegen.

3

Vor der Verwendung eine kleine Menge Flüssigkeit auf einen Block applizieren, um sicherzustellen, dass das Material gut durch die SofNeedle-Applikationsspitze fließt.

4

Nach der Verwendung die SofNeedle entfernen und entsorgen. Kappe wieder aufsetzen und die Spritze desinfizieren.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Glu/Sense Desensibilisierungsgel auf das Dentin des Zahns auftragen und 30 Sekunden lang sanft einmassieren. Trocknen und ggf. mit der Restauration fortfahren. Kontakt mit Weichgewebe vermeiden. Wenn Glu/Sense doch damit in Kontakt kommt, sofort mit viel Wasser spülen. (Siehe Abschnitt Warnhinweise).

Präparation:

1

Pulpaschutz wenn nötig über pulpanahe Bereiche geben.

2

Das Dentin muss nicht trocken sein, auch eine feuchte Oberfläche ist ausreichend.

3

Die Entfernung der Schmierschicht auf dem Dentin ist nicht notwendig. Wenn jedoch ein Dentin-Bondingmittel verwendet wird, das „Total-Etch“ erforderlich macht, sollte die Schmierschicht zunächst durch Ätzen entfernt werden, bevor Glu/Sense aufgetragen wird.

4

Nach dem Applizieren von Glu/Sense mit Druckluftstrahl trocknen und anschließend gründlich spülen und absaugen.

5

Jede Schicht 30 Sekunden lang durch sanftes Einreiben applizieren.

6

Glu/Sense ist mit allen restaurativen Materialien kompatibel und kann unter Kompositen, Zementen, Glasionomeren und Amalgam verwendet werden.

Bei zervikaler Sensitivität (wenn kein restauratives Material eingebracht werden soll):

1

Die Oberfläche mit Bimsstein reinigen und mit Wasser spülen.

2

Wenn der Bereich für die Reinigung mit Bimsstein zu empfindlich ist, diesen Schritt auslassen und die kleinstmögliche Menge Glu/Sense Desensibilisierungsgel in einer oder zwei Schichten auftragen. Jede Schicht 30 Sekunden lang durch sanftes Einreiben auftragen.

3

Mit sanftem Druckluftstrom gründlich trocknen, bis der Flüssigkeitsfilm verschwunden ist und die Oberfläche nicht mehr glänzt. Gründlich mit Wasser spülen.

4

Kontakt mit Weichgewebe vermeiden. Siehe Warnhinweis unten.

5

In extremen Fällen von Dentinüberempfindlichkeit kann ein Dentin-Bondingmittel oder – Lack über das mit Glu/Sense behandelte Dentin aufgetragen werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Der Glu/Sense Dentin-Desensibilisierer darf nur von Zahnärzten verwendet werden.

Schleimhäute mit einem Kofferdam schützen. Sicherstellen, dass der Glu/Sense Dentin-Desensibilisierer nur mit dem zu behandelnden Bereich in Kontakt kommt.

Warnung:

Kontakt mit den Augen, der Haut und Weichgewebe vermeiden. Wenn Glu/Sense doch damit in Berührung kommt, sofort mit viel Wasser spülen. Anhaltender Kontakt mit Gewebe kann zu Rötungen oder Verbrennungen führen. Dann wie jede andere chemische Verbrennung behandeln. Bei Kontakt mit den Augen, sofort einen Arzt konsultieren. Nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit auf HEMA oder Glutaraldehyd verwenden.