

## **Die Anwendung dieses Produkts**

**1**

Schutzfolie von der Unterseite des LubeCube abziehen.

**2**

LubeCube an der gewünschten Stelle platzieren und/oder anhaften (Handrücken, Patientenumhang, Tray usw.).

**3**

Die Spitze des Kompositinstruments in den Schlitz des LubeCube stecken.

**4**

Spitze des Kompositinstruments im Schlitz hin und her schieben, um es zu reinigen und zu schmieren.

**5**

Das Kompositinstrument herausnehmen und mit dem Modellieren der Restauration beginnen.

**6**

Die Schritte 3 bis 5 nach Bedarf wiederholen, bis die Restauration fertig ist.

**7**

Gebrauchten LubeCube entsorgen.