

1

Drücken Sie etwas Material aus jeder Kartusche aus, bevor Sie die SuperMixer™-Mischkanülen aufsetzen, um eine gleichmäßige Mischung beider Materialien zu gewährleisten.

2

Bereiten Sie den Zahn wie gewohnt vor. Die Präparation mit Einlage oder Luftbläser trocknen.

3

Beschicken Sie den Abformlöffel mit NoCord MegaBody Tray Löffelmaterial. Es wird empfohlen, einen Abformlöffel oder Segmentabformlöffel (Triple Tray) mit Wand zu verwenden.

4

Reichlich NoCord Wash Korrekturmaterial in den Sulkus, um die Präparation und die Nachbarzähne herum injizieren.

5

Wir empfehlen, die vollständige Abbindung anhand einer kleinen Kontrollmenge zeitlich zu überwachen. Drücken Sie hierzu eine perlengroße Menge des Korrektur- und Löffelmaterials aus. Starten Sie den Timer, wenn Sie zum ersten Mal eines der beiden Materialien ausdrücken.

6

Platzieren Sie das Mega Body Tray Löffelmaterial auf das noch nicht abgebundene NoCord Wash-Material. Lassen Sie den Patienten den Mund schließen oder halten Sie den Löffel mit leichtem Druck in situ, bis das Material fest ist.

7

Prüfen Sie Ihre parallele Kontrollmenge, ob die Abbindung erfolgt ist. Nach 4:45 Minuten aus dem Mund nehmen.

8

Prüfen Sie die Abformung. Erstellen Sie die endgültige Restauration. Einfache, präzise Abformungen!