

So wird Onyx™ angewendet:

- 1** Kappe von der Spritze entfernen und einen Aufsatz mit Nadelspitze aufschrauben.
- 2** Ätzmittel aus der Spritze auf den Anmischblock oder in die Mischschale spritzen.
- 3** Ätzmittel mit einem Benda®-Pinsel oder einem anderen Applikator auf die Zahnoberfläche auftragen.
- 4** 15 Sekunden auf der Zahnoberfläche einwirken lassen. Mit Wasser und Absaugung mit hoher Durchflussmenge abspülen.
- 5** Vorsichtig trocknen. Die Zahnoberfläche sollte stumpf aussehen. Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie die vorstehenden Schritte.
- 6** Entfernen Sie die Nadel, Spritzenzylinder wieder verschließen und desinfizieren.

ACHTUNG: Onyx™ enthält 40 % ige Phosphorsäure. Kontakt mit Haut, Augen oder Mundschleimhaut vermeiden. Bei Kontakt mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.