

PROTECTO® ONE-STEP-SEAL

Schutzlack zur Versiegelung von Zähnen

Indikation

Protecto ist ein patentiertes silikongruppenhaltiges Co-Polymer mit nicht sauren Haftgruppen zur Versiegelung von **glatten** Zahnflächen

- insbesondere zur Versiegelung von Zähnen, dessen Schmelz durch die Multibandbehandlung besonderer Gefährdung und Belastung durch erschwerte Zahnreinigung ausgesetzt ist
- zum Schutz vor Verfärbung nach Bleaching
- Dentinschutz bei überempfindlichen Zahnhälsen

Protecto ist besonders zahnschonend, da **keine Schmelzätzung** nötig ist. Protecto bildet einen semipermeablen netzartigen und säureangriffsmildernden Schutzfilm gegen thermische und mechanische Einflüsse, die Verarbeitung ist einfach und zeitsparend. Der Schutzfilm kann bei Bedarf erneuert werden. Protecto ist ein transparenter Lack, der nicht abgenommen werden muß.

Applikation

1. Die kariesfreien zu behandelnden Zähne werden gründlich mit ölfreier Paste gereinigt, poliert und im wasser- und ölfreien Luftstrom getrocknet. Nur wenige Tropfen kurz vor der Anwendung in die Mischschale tropfen, da *Protecto* sehr schnell trocknet.
2. Anschließend wird *Protecto* mit den beigegeführten Filzapplikatoren auf die zu versiegelnden Flächen dünn in mehreren Schichten aufgetragen, d. h. kreuz und quer **und** trocknen lassen und **3 bis 4 mal wiederholen**. Die mehrfache Wiederholung ist besonders **wichtig** für die angeätzten Bereiche rund um das Bracket.
3. Falls zuviel Flüssigkeit mit dem Filzapplikator aufgenommen wurde, etwas auf einem Zelltuch abstreichen, sodass die Schleimhaut nicht mit *Protecto* in Berührung kommt (Kofferdam vorteilhaft). Sollte die Schleimhaut mit *Protecto*® in Berührung kommen, kann dies ein leicht brennendes Gefühl erzeugen. Dieses wird durch Ausspülen des Mundes oder sorgfältiges Absprayen der benetzten Oberfläche mit Wasser nach der 1-minütigen Trocknungszeit sofort beendet.
4. Den Schutzlack ca. 1 Minute lufttrocknen lassen. Der intensive Geruch verflüchtigt sich innerhalb 1 Minute.
5. Die Flasche sofort nach Gebrauch wieder verschließen.
6. Um Grauschleier vorzubeugen und für eine sehr glatte Oberfläche wird eine Politur mit Polierbürstchen empfohlen. Eine Politur glättet die Lackschicht und mindert das Anhaften von Mikroorganismen.

Wasser-Pulverstrahlgeräte

Die Behandlung mit Wasser-Pulverstrahlgeräten beeinträchtigt die Schutzschicht, daher ist eine erneute Applikation von *Protecto* empfehlenswert. Die *Protecto* - Schicht schützt aber auch gleichzeitig vor weiterem Abtrag der Zahnschicht durch Wasser-Pulverstrahlgeräte. Dies ist besonders zu beachten bei den durch das Ätzen bereits demineralisierten Zähnen im Bereich rund um das Bracket. Bei Anwendung von Wasser-Pulverstrahlgeräten auf dem vorgeätzten Schmelz kann sich das Ätzrelief noch tiefer ausprägen.

Anwendungshinweis bei Verwendung eines Bracketklebers mit selbstkonditionierendem Primer (z.B. Tectosan-F)

Da der selbstkonditionierende Primer nicht so wasserlöslich ist, wie marktübliche Ätzgele (Orthophosphorsäure) empfehlen wir, die Versiegelung erst ca. zwei Wochen nach der Befestigung von Brackets vorzunehmen. In dieser Zeit werden durch den Abrieb mit der Zahnbürste alle möglichen Reste des selbstkonditionierenden Primers entfernt. Direkt nach der Bracketbefestigung empfehlen wir eine Fluoridierungsmaßnahme durchzuführen, die die konditionierten Flächen neben dem Bracket remineralisiert.

Wichtige Hinweise

Entfernen der Bracketadhäsivpaste

Das Befestigen der Brackets erfolgt vor der Behandlung mit *Protecto* - Schutzlack. Anschließend: überschüssige Bracketadhäsivpaste entfernen, mit Alkohol Reste entfernen, mit Wasser absprayen, mit ölfreier Luft trocken blasen, mit Alkohol nachtrocknen.

Bitte wenden!

Beläge

Protecto haftet nicht auf nicht ausgehärtetem Bracketadhäsiv bzw. - Primer, auf Plaque oder sonstigen Belägen. Der intensive Geruch verflüchtigt sich schnell innerhalb der Trocknungszeit von 1 Minute.

Säuren

Verbliebene Säure (Ätzel) auf dem Schmelz vor der Applikation von *Protecto* führt zu möglichen Entkalkungen, daher Zahn gut spülen und von Ätzelresten befreien. Durch die Konditionierung (Ätzung) der Schmelzflächen, die nicht mit dem Bracket bedeckt sind, entstehen empfindliche demineralisierte Schmelzbereiche.

Eine zu starke Behandlung mit Ätzel (Einwirkungszeit) und der dadurch entstandene Eingriff im Zahnschmelz können durch *Protecto* nicht kompensiert werden.

Zahnpflege

Wir empfehlen, dem Patienten Hinweise mitzugeben, besonders direkt nach dem Bracketkleben auf schmelzschädigende Nahrungsmittel zu verzichten (z.B. Süßigkeiten, Coca-Cola). *Protecto* ersetzt nicht eine gute Mundhygiene.

Wechselwirkung Mundspül-Lösungen

Mundspülungen mit Chlorhexidinpräparaten können nach der Applikation und Trocknung von *Protecto* durchgeführt werden. Eine Spülung vor der *Protecto* -Applikation könnte die Haftung am Schmelz stören.

Nebenwirkungen

Systemische Nebenwirkungen sind nicht bekannt geworden. Sollten Allergien gegen Bestandteile von *Protecto* bekannt sein, ist auf die Anwendung von *Protecto* zu verzichten.

Zusätzliche Fluoridierungsmaßnahmen

Wenn vor einer *Protecto* - Applikation eine Fluoridbehandlung durchgeführt wird, am besten einen Zeitabstand von zwei Wochen wahren, bis die Nachwirkung der Remineralisation abgeschlossen ist. Eine Fluoridierungsbehandlung auf der *Protecto* -Schicht lässt nur Spuren eines Fluoridproduktes durch den versiegelten Bereich. Sonstige Fluoridierungsmaßnahmen wie fluoridierte Zahnpasten oder Gele sind wichtig für die nicht versiegelten Flächen, z. B. Approximalebereiche und können jederzeit zusätzlich zu *Protecto* eingesetzt werden.

Sonstige Hinweise

Das Befestigen der Brackets erfolgt vor der Behandlung mit *Protecto* Schutzlack. Wenn die Behandlung mit *Protecto* direkt nach dem Befestigen der Brackets erfolgt, ist es wichtig, dass das neben der Bracketbasis austretende Adhäsiv völlig ausgehärtet ist, bzw. entfernt wurde.

Protecto enthält Ethylacetat. Ethylacetat ist leicht entflammbar und daher von Zündquellen fernzuhalten. Bei Kontakt mit den Augen sind diese mit viel Wasser zu spülen und ggf. ist ein Arzt aufzusuchen. Bei versehentlichem Hautkontakt sind die Kontaktstellen sofort gründlich mit Seife und Wasser zu waschen.

Eine Kontamination des Flascheninhalts mit verunreinigten Einmalpinseln muß vermieden werden.

Eine Abformung der mit *Protecto* Schutzlack behandelten Zähne mit Vinylsilikon ist frühestens 4 Wochen nach der Behandlung möglich. *Protecto* trägt sich mit der Zeit ab. Kürzere Anwendungsintervalle werden empfohlen bei erhöhtem Kariesrisiko, vorhandenen initialläsionen oder Gefährdung durch Schmelzerosionen, z.B. bei Genuss von schmelzschädigenden Nahrungsmitteln sowie nach der Anwendung von Wasser-Pulverstrahlgeräten. Auf Komposit- oder Kompomer-Restaurationen erfolgt nur eine Haftung von geringer Dauer.

Lagerhinweis: Nicht über 25°C (77°F) lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden! Behälter gut verschlossen halten. *Protecto* ist durch den Anteil an Ethylacetat sehr flüchtig. Das Material stets trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. *Protecto* sollte an einem gut gelüfteten Platz aufbewahrt werden.

Zusammensetzung: Silikonpolyacrylat gelöst in Ethylacetat

Handelsform: *Protecto* Artikel-Nr. 7200-100 4 ml Flasche, 4 Mischpaletten, 20 Microbrushes

Garantie und Haftungsbeschränkung

SanaPro Dental GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. SanaPro Dental GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Veräußerlichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von SanaPro Dental GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des Produktes.

Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für SanaPro Dental GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!



Manufacturer: SanaPro Dental GmbH, 27570 Bremerhaven, Germany
Vertrieb: BonaDent GmbH, Dental-Produkte Postfach 560226, D-60407 Frankfurt,
Tel: 069-586 073 90, Fax: 069-586 073 931
Internet: www.bonadent.de, Mail: bonadent@t-online.de



Protecto ist eine Handelsmarke der Firma BonaDent GmbH

Protecto SP 2020/ Stand: 21.01.2020