

SD - Modell-Stecksystem *SD-model-plug system*





SD - Modell-Stecksystem

SD-model-plug system

Verarbeitung

Modelle sollen zum Reokkludieren vorbereitet werden. Soll die Modellführung über ein Split-Cast System erfolgen?

Das SD-Modell-Stecksystem vereinigt beide Forderungen auf einfachste Art. Es besteht aus Sockelformern sowie Steckern und Hül- sen aus Plastik!

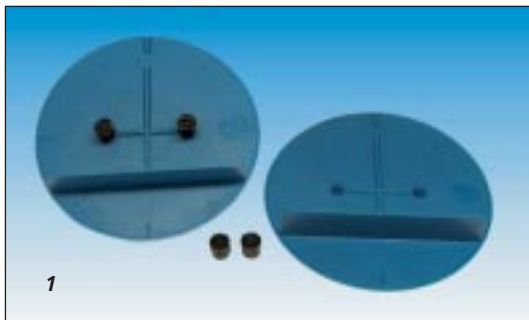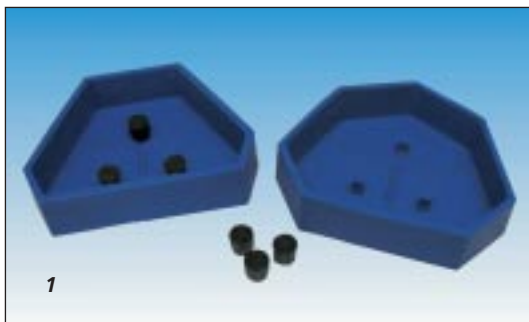

Processing

Models should be re-occluded with a split cast system?

The SD-model-plugs are an easy and inexpensive way to fulfill this demand! Base, husks and plugs are all made of plastic.

Fig. 1

Zunächst werden die Sockler für OK und UK nach Größe ausgewählt.

First of all select the appropriate base size for upper or lower.

Auf die Zapfen in den Socklern werden die schwarzen Hülsen aufgesteckt (bis zu 3 Hülsen).

Fit the black husks to the pins in the base (up to 3 husks).

Fig. 2

Die Sockler werden mit Gips gefüllt und der ausgegossene Abdruck aufgesetzt.

The base is filled with plaster and the poured out impression is set onto the base.



Fig. 3

Nach dem Erhärten des Gipses wird der Abdruck entfernt und die Modelle aus dem Sockler genommen.

After the plaster has reached its final hardness remove the impression and base from the model.



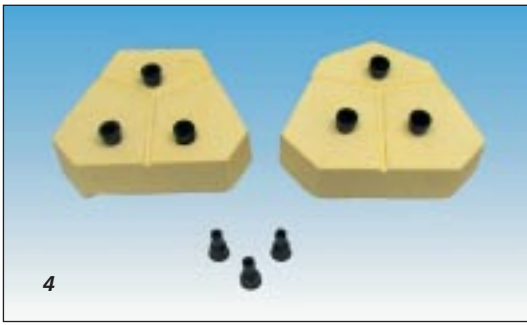


Fig. 4

Die Unterseite des Modells kann, wenn nötig, bis zu 5 mm gekürzt werden (trimmen).

The bottom of the model can be trimmed by up to 5mm.



Fig. 5

Die Stecker werden in die Hülsen gedrückt, das Modell isoliert und dann in den Artikulator-Gips gesetzt.

The plugs are pressed into the husks, the model is isolated and then set into the articulation plaster.



Fig. 6 & 7

Nach Erhärten des Artikulations-Gipses kann nun jederzeit das Modell zur Kontrolle und Modellation herausgenommen werden.

After the articulation plaster has set, the model can be taken out of the articulator at any time to check the wax up.

Set komplett

bestehend aus: 4 Socklern, 500 Steckern, 500 Hülsen Best.-Nr. 100

Einzelteile

Sockler OK klein	Best.-Nr. 111
Sockler UK klein	Best.-Nr. 112
Sockler OK groß	Best.-Nr. 113
Sockler UK groß	Best.-Nr. 114
Stecker 500 Stck.	Best.-Nr. 102
Hülsen 500 Stck.	Best.-Nr. 103


Complete set

consisting of: 4 bases, 500 plugs, 500 husks Order No. 100

Separate parts

Base upper small	Order No. 111
Base lower small	Order No. 112
Base upper big	Order No. 113
Base lower big	Order No. 114
Plugs 500 pcs.	Order No. 102
Husks 500 pcs.	Order No. 103

Dental Total

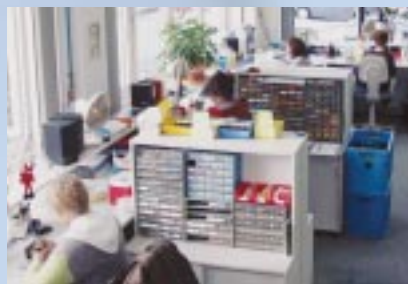

Händler / Distributor



Servo-Dental GmbH & Co. KG
Rohrstraße 30
D-58093 Hagen-Halden
Telefon: 023 31/95 91-0
Telefax: 023 31/95 91-40
Internet: www.Servo-Dental.de
e-mail: Info@Servo-Dental.de

Zertifiziertes
Qualitätssicherungssystem
Certified Quality
Management System