

## So wird Tempit verwendet:

- 1** Entfernen Sie die Kappe.
- 2** Setzen Sie die Karpule in die C-R® Spritze ein.
- 3** Die Spritze/Pistole mit einem langsamen, gleichmäßigen Druck betätigen und in die feuchte Kavität injizieren.
- 4** Mit einem feuchten Instrument nach unten drücken und den Patienten entlassen.
- 5** Bei Wiedervorstellung kann Tempit® mit einer Sonde entfernt werden.

## So wird Tempit-E verwendet:

- 1** Kappe abnehmen.
- 2** Karpule in eine C-R®-Spritze einlegen.
- 3** Das Material wird direkt in die Präparation injiziert. Tempit und Tempit-E sind feuchtigkeitsaktiviert und beide binden in 5 Minuten ab. Tempit L/C und Ultra-F sind lichtaktiviert.
- 4** Die Karpule wird nach der Benutzung einfach entsorgt.

## So wird Tempit L/C verwendet:

- 1** Spülen und trocknen Sie die Kavität.
- 2** Setzen Sie die Karpule in den C-R® Spritze/Pistole und entfernen Sie die Kappe.
- 3** Betätigen Sie die Spritze/Pistole und injizieren Sie unter langsamen, gleichmäßigen Druck in die Präparation. Nicht zu feste drücken.
- 4** Bei Inlay-/Onlay-Anwendungen halten Sie die Kontaktflächen mit einem Matrizenband frei von Material.
- 5** Alle Oberflächen mindestens 45 Sekunden lang lichthärten.
- 6** Überprüfen Sie die Okklusion. Überschüsse können mit einem rotierenden Instrument oder Skalpell entfernt werden.
- 7** Entfernen Sie die Karpule aus der Spritze/Pistole und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Sterilisieren Sie den Griff der C-R-Spritze.
- 8** Um TEMPIT® L/C zu entfernen, führen Sie eine scharfe Sonde in das Material ein und ziehen Sie sie wieder heraus. Nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegenüber Methacrylat verwenden. Nicht in Gegenwart von Eugenol verwenden.

## So wird Tempit Ultra verwendet:

Nicht in Gegenwart von Eugenol verwenden.

**1**

Präparation säubern und desinfizieren. Auf freiliegende Pulpa eine Calciumhydroxid-Überkappung applizieren (Calciject™). Bei vitalem Dentin wird ein desensibilisierender Liner (Glu/Sense™) empfohlen. Nicht sauer Ätzen oder Bondingsysteme verwenden.

**2**

Die Präparation sollte so trocken wie möglich sein.

**3**

TEMPIT® ULTRA Karpule in die Spritze/Pistole geben. Kappe entfernen und injizieren. Verwenden Sie bei Bedarf eine Matrize. Formen und Konturieren mit herkömmlichen Kompositinstrumenten. Um die Klebrigkeit zu reduzieren, tauchen Sie die Instrumente in Alkohol oder kühlen Sie die TEMPIT® ULTRA Karpulen vor Gebrauch.

**4**

Mit einer herkömmlichen Halogenlichtquelle 40 Sekunden lichthärten. TEMPIT® ULTRA härtet bis zu 6 mm tief aus.

**5**

Um die Okklusion anzupassen oder TEMPIT® ULTRA nach dem Abbinden zu entfernen, verwenden Sie wassergekühlte Bohrer oder Diamantbohrer. Von Quellen mit starkem sichtbarem Licht fernhalten. Nicht einfrieren.