


UPOFIX® - PULIDORES

Cepillos	Aplicación	Campo de aplicación
0	Pulido	Todos los metales
I	Prepulido	Todos los metales
II	Alto brillo	Todos los metales
III	Prepulido	Cerámica
IV	Alto brillo	Cerámica
IV	Prepulido	Resina compuesta
V	Alto brillo	Resina compuesta

Atención: 3' – 5.000 r.p.m.(lento con presión de contacto incrementada)

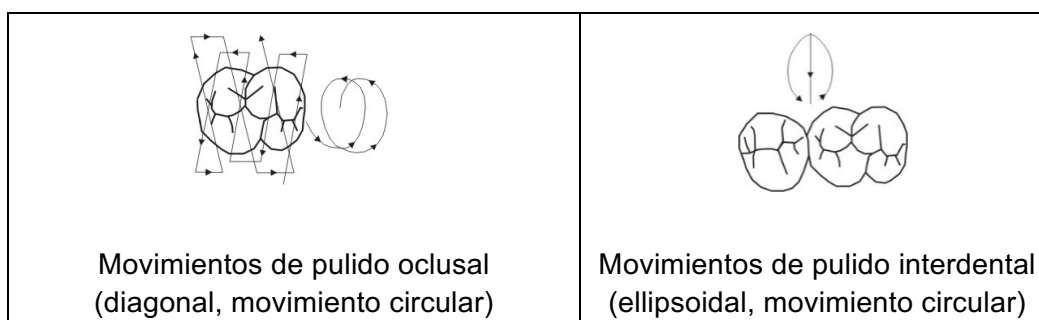

Revoluciones lentas – 3000 r.p.m. y presión de contacto incrementada: abrasivos (pre) pulido

Revoluciones incrementadas 3000-5000 r.p.m. con ligera o ninguna presión: pulido final.

Para más favor ver descripción en el catálogo laboratorio.

Fabricante:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 12/14