

## **Gebrauchsanweisung**

**1**

Präparieren sie den Zahn und tragen Sie das Bonding auf.

**2**

Biegen Sie die Nadelspitze falls benötigt. Drücken Sie die Spritze mit einem langsamen, konstanten Druck. Geben Sie erst eine kleine Menge auf ein Anmischblock.

**3**

Spritzen Sie Schichten, welche nicht dicker als 2mm dick sind. Lichthärten Sie jede Schicht für mindestens 30 Sekunden.

**4**

Entfernen Sie die Nadelspitze/ Karpule und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß. Desinfizieren Sie die Spritze.