

## **Gebrauchsanweisung**

So wird das Produkt angewendet:

Lichthärtendes Hybridkomposit für Restaurationen. Verwenden Sie es mit einem Bonding und einem Polymerisationsgerät. Nicht zusammen mit eugenolhaltigen Materialien.

**1**

Präparieren Sie den Zahn. Ätzen Sie die Oberflächen und applizieren Sie ein lichthärtendes Bonding.

**2**

Wählen Sie eine Karpule mit dem benötigten Farbton. Entfernen Sie die Verschlusskappe und klicken Sie die Karpule in eine CENTRIX C-R® Spritze (Snap-Fit®, S/Class® oder Mk IIIp™).

**3**

Drücken Sie langsam und gleichmäßig. Testen Sie das Material zuerst auf einem Anmischblock bevor Sie es im Mund anwenden.

**4**

Platzieren Sie die Spitze am Grund der Restauration und injizieren Sie und ziehen Sie dabei gleichzeitig zurück. Platzieren Sie keine Schichten dicker als 2mm. Entfernen Sie nicht die durch Luft beeinflusste Schicht zwischen den Applikationen. Härten Sie jede Schicht für mindestens 30 Sekunden.

**5**

Modellieren und finalisieren Sie die Restauration unter Verwendung eines normalen Komposit-Finierinstruments. Polieren Sie die Restauration z.B. mit unseren Couture Finier- und Polierkelchen und -spitzen.

Entfernen Sie die VersaLite Karpule aus der Spritze und entsorgen Sie diese fachgerecht. Verwenden Sie die Karpule nicht bei einem zweiten Patienten. Reinigen Sie die Spritze fachgerecht. Bewahren sie VersaLite in kühler und trockener Umgebung (maximale Umgebungstemperatur 24°C). Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und Eugenol. Es ist möglich, dass Patienten allergisch auf Kompositharze reagieren.