



Wash-Sensor Halterung

Universalhalterung aus Edelstahl zur Aufnahme der Reinigungsindikatoren Wash-Sensor RDG und Wash-Sensor U.

»» Verwendungszweck

Aufnahme der Reinigungsindikatoren Wash-Sensor RDG und Wash-Sensor U zur Überwachung der Reinigungswirkung bei medizinischen Instrumenten in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten sowie Ultraschallreinigungsgeräten.

Produkt	Best.-Nr.	Packungsgröße
Wash-Sensor Halterung	830001	1 Stück

»» Anleitung RDG

Halterung in das RDG einlegen oder einhängen. Die offene Vorderseite muss in das Innere des RDG weisen.

»» Anleitung U

Halterung über dem Ultraschallgeber einlegen. Die Halterung nach obenweisend so auf den Rücken legen, dass sich die aus den Halterungen herausragenden Teile der Indikatorplättchen zentrisch über den Ultraschallgebern befinden.



Wash-Sensor RDG Indikatorplättchen seitlich in die Halterung einschieben. Darauf achten, dass die Vorderseite des Indikatorplättchens mit der roten Testanschmutzung im offenen Teil der Halterung sichtbar bleibt.



Wash-Sensor U Indikatorplättchen seitlich von rechts und mit der Testanschmutzung nach vorne bzw. oben gerichtet bis zur Markierung in die Wash-Sensor Halterung einschieben.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktinformationen

- Stericop Wash-Sensor RDG
- Stericop Wash-Sensor U

oder besuchen Sie unsere Internetseite www.stericop.com