

neodisher[®] LM 2

Mild alkalisch reinigingsmiddel voor dompel- en ultrasoonbaden
Vloeibaar concentraat



Belangrijkste toepassingsgebied:

- Manuele reiniging van laboratoriumglaswerk en chirurgisch instrumentarium in dompelbad en ultrasoonbad
- Manuele reiniging van kooien en toebehoren in de dierhouderij.
- Machinaal reinigen van pipetten.

Eigenschappen:

neodisher[®] LM 2 is schuimarm en er zijn extra componenten toegevoegd voor een verhoogd reinigend effect.

Dankzij het schuimarme karakter geschikt voor manuele voorreiniging waarna de voorwerpen direct, zonder noodzakelijke tussenspoeling, in de spoelmachine kunnen worden overgebracht.

Verwijdert organische vervuiling zoals bijvoorbeeld ingedroogd bloed, eiwitresten, resten van voedingsmiddelen en achtergebleven voedingsresten en uitwerpselen in dierenkooien evenals anorganische vervuilingen. Ondersteunt het verwijderen van resten tandcement.

neodisher[®] LM 2 is Zeer geschikt voor de reiniging van chirurgische en dentale instrumenten (met name micro-instrumentarium) in een ultrasoonbad.

Indien het laboratoriumglaswerk vóór afgaan aan het machinale reinigen wordt geautoclaveerd, wordt geadviseerd om dit in een nat proces te doen onder toevoeging van neodisher LM 2 (30 ml/l). Vervuilingen branden niet in en zijn bij de machinale reiniging gemakkelijker te verwijderen.

Geschikt voor de gangbare materialen voor laboratoriumbenodigdheden zoals glas, keramiek, roestvast staal en kunststoffen.
Bij bontmetaal / lichtmetaal eerst een test uitvoeren!

Toepasbaar bij alle waterhardheden.

Dosering en gebruik:

Handmatige reiniging van laboratoriumglaswerk en chirurgische instrumenten:
5 - 20 ml/l in dompel- en ultrasoonbaden
10 - 30 ml/l in pipettenspoelmachines
Inwerktijd: 10 - 30 min.

The neodisher LM 2 gebruiks-oplossing moet volledig met water afgespoeld worden (bij voorkeur met demi-water).

Na gebruik ander product het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Niet vermengen met andere producten.

Let ook op de aanwijzingen van de instrumenten fabrikant voor reinigen en desinfecteren volgens de DIN en ISO 17664 richtlijnen.

Alleen voor professioneel gebruik!

Productgegevens:

Soortelijkgewicht (20 °C): 1.2 g/cm³
pH-waarde (in demi water, 20 °C) 5 - 30 ml/l : 10.6 - 11.3
Viscositeit (concentraat, 20 °C): < 10 mPas



Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl

neodisher[®] LM 2

Mild alkalisch reinigingsmiddel voor dompel- en ultrasoonbaden
Vloeibaar concentraat




Ingredienten:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:
< 5 % amfotere tenside, anionische tenside
15 - 30 % fosfaten

CE-markering:

neodisher[®] LM 2 voldoet aan de eisen van Richtlijn 93/42/EWG, bijlage I over medische producten.

Hantering en opslag:

Product is gevoelig voor vorst.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden.
Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de stempel op het etiket achter het zandloper symbool .

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 4403/2-3
Versie: 08-2014
Vervangt: 13-09-2011



Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl