

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher® MA

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGBIED:

- Machinale reiniging van chirurgische instrumenten, anesthesietoebereiden, OK-klompen, babyflessen en overige medische voorwerpen.
- Machinale reiniging van glaswerk uit medische, biologische en chemische laboratoria.

EIGENSCHAPPEN:

- Mildalkalisch middel, schuimarm
- Goede reinigend vermogen v.w.b. bloed- eiwit- en voedingsmiddelenresten
- Goede materiaalbescherming: Laboratoriumglas, roestvaststalen instrumenten, zuiver aluminium, aluminiummagnesium legeringen, verchroomde apparaten, apparaten van kunststof en anesthesietoebereiden worden tegen corrosie beschermd
- Bij geëloxeerde voorwerpen wordt de agressiviteit van onthard water op de geëloxeerde laag afgeremd
- Maataanduidingen blijven goed intact
- Geschikt voor alle waterhardheden

DOSERING/GEBRUIK:

- **Algemeen:** 1 - 4 g/l (handmatige dosering of via een poederdoseerapparaat)
- **Verwijdering van bloed, serum, sputum en weefselresten:**

Reiniging: neodisher® MA, 3 g/l, 60-95 °C.

Neutralisatie: neodisher® Z, 1-2 ml/l.

OPMERKINGEN:

Gebruiksoplossing na afloop goed naspoelen (bij voorkeur met demiwater) om vlekken te voorkomen. Bij *chirurgische instrumenten* is het raadzaam om neodisher® IP Konz aan het laatste spoelwater toe te voegen (1 – 2 ml/l) voor extra oppervlaktebescherming. Dit is ook aan te bevelen in geval de scharnieren van de instrumenten in een latere fase gericht worden geolied.

- **Verwijdering van melk-, babyvoedings- en papresten:**

Reiniging: neodisher® MA, 3 g/l, 70 - 95 °C.

Neutralisatie: neodisher® Z, 1ml/l.

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher® MA

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

- **Verwijdering van voedingsbodemresten, reagentia, bloed en serum:**

Reiniging: neodisher® MA, 3 g/l

Neutralisatie: neodisher® Z, 1-2 ml/l.

OPMERKINGEN:

Gebruiksooplossing na afloop *goed naspoelen* (bij voorkeur met demiwater) om vlekken te voorkomen.

Voedingsbodems dienen vóór de reiniging verwijderd te worden.

Bij problemen met de verwijdering van kleurstoffen, zoals gentiaanviolet etc., dient in de voorspoeling neodisher® N of neodisher® GK gebruikt te worden.

NB:

Niet vermengen met andere producten!

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

PRODUCTGEGEVENS:

Verschijningsvorm:	poedervormig
Stortgewicht:	915 - 965 g/ l
pH (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 1 – 4 g/l:	11,5 -12,1
Houdbaarheid:	24 maanden (zie opslagcondities!)
Verschijningsvorm:	poedervormig

CE-MARKERING_(conform de **richtlijn 93/42/EWG** voor medische producten)

SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- < 5 % nietionische tenside
- > 30 % fosfaten

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher® MA

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Opslag:	Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	-
Minimum / maximum temperatuur:	zie etiket.
Overig:	Niet blootstellen aan direct zonlicht. Verpakking na gebruik weer goed sluiten; product kan door vochtige omstandigheden verklonteren en aan werkzaamheid verliezen. Reageert met : Zuur, geconcentreerd. Water.

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):

UN nummer:	3253
	DINATRIUMTRIOXOSILICAAT, MENGSEL
Klasse: 8	Verpakkingsgroep: III

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC		
Gevarensymbool:	C	bijtend
	Bevat:	dinatriummetasilicaat
Bijzondere gevaren:	R 34 R 37	Veroorzaakt brandwonden. Irriterend voor de ademhalingswegen.
Veiligheidsaanbevelingen:	S 26 S 27 S 28 S36/37/39 S 45	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
		Lege verpakkingen alleen afvoeren als ze grondig zijn uitgespoeld en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie het Veiligheids Informatieblad.

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher® MA

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM): Schadelijk voor in water levende organismen

SANERINGSINSPANNING: B

VERPAKKING(EN):

Artikelnummer fabrikant:	Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
410784	608233	10 x 1 kg
410776	608133	10 kg

Versie: 11-08-2008 (vervangt versie: 16-06-2006)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl !

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit trekt niet tot de vrijstelling van de gebruiker om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.