




neodisher[®] MA Dental



Alkalische reinigingsmiddel voor
machinale reiniging van
tandheeskundige instrumenten

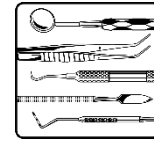

Poeder

Toepassingsgebied:

- Machinale reiniging van tandheeskundige instrumenten en gebruiksvoorwerpen zoals trays, mondspoelbekers en nierschalen

Werkingscapaciteit:

- Goed reinigings- en emulgiëvermogen bij bloed- en eiwitresiduen
- Beschermt instrumenten en tandheeskundige gebruiksvoorwerpen van rvs tegen corrosie
- Niet geschikt voor machinale reiniging van overdrachtsinstrumenten. Hiervoor adviseren wij het reinigingsmiddel neodisher MediClean Dental

Bijzondere eigenschappen:

- Met hoge materiaalbescherming
- Bij uitstek geschikt voor programma's met thermische desinfectie

Toepassing en dosering:

neodisher MA Dental wordt gebruikt in reinigings- en desinfectieapparaten voor tandheeskundige instrumenten. Het middel wordt gedoseerd via het doseerapparaat voor poederreinigers in de deur en bedraagt

3 g/l.

Composiet-, tandcement- en afdruckmassaresten moeten van de instrumenten worden verwijderd voordat ze uitgehard zijn.

Ter voorkoming van watervlekken wordt het gebruik van volledig ontzilt water in de afsluitende spoeling aanbevolen.

De gebruikoplossing van neodisher MA Dental moet met water (bij voorkeur gedemineraliseerd) volledig worden afgespoeld.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- Alleen voor commerciële toepassingen.
- Niet mengen met andere producten.
- Het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.
- Let op de aanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen met betrekking tot het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren conform de eisen van DIN EN ISO 17664.
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van het reinigings- en desinfectieapparaat op.

Technische gegevens:

pH-waarde	11,5 (3 g/l, bepaald in gedemineraliseerd water, 20 °C)
Stortgewicht	ca. 1.015 - 1.065 g/l
Titreerfactor	0,54 (conform de titreerhandleiding van neodisher)

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:

< 5 % niet-ionische tensiden

> 30 % fosfaten

CE-markering:

neodisher MA Dental voldoet aan de voorschriften die voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie ervan op de hoogte te worden gesteld.



Opslaginstructies:

Deksel na het uitnemen van het product sluiten! Het product kan onder invloed van vocht klonteren en aan werkzaamheid inboeten. Tijdens de opslag moet een temperatuur tussen 0 °C en 30 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 2 jaar houdbaar. Uiterste gebruiksdatum: zie opdruk op het etiket achter het symbool .

Gevaren- en veiligheidsinstructies

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsgegevensbladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 'Service/Downloads'.

Vaten alleen volledig geleegd en gesloten afvoeren. Afvoer van productresten: zie veiligheidsinformatieblad.

MB 4113/3-2 Versie 02/2021

De informatie op dit gegevensblad berust op onze huidige kennis en ervaringen. Zij ontslaat de gebruiker niet van het uitvoeren van eigen onderzoeken en experimenten. Hieruit kan geen juridisch bindende toezegging van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.