

neodisher[®] MediKlar Dental

Liquide de rinçage en laveurs désinfecteurs pour instruments dentaires
Concentré liquide



Principaux domaines d'utilisation :

Pour le rinçage en machine des instruments dentaires, des ustensiles et des plateaux dans les établissements de chirurgie dentaire et les cabinets de dentistes

Propriétés :

neodisher MediKlar Dental réduit le temps de séchage sur l'acier inoxydable et les matières plastiques grâce à ses propriétés mouillantes en surface. Neutralise également les résidus alcalins.

A doser dans la dernière eau de rinçage.

Utilisation et dosage :

0,2 - 0,4 ml/l dans le doseur de la machine au rinçage final

Utiliser si possible de l'eau déminéralisée pur le rinçage final, cela évite les traces d'eau et protège l'aluminium anodisé.

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Lors des changements de produit effectuer un rinçage complet du système de dosage ainsi que des tuyaux à l'eau.

Respecter les recommandations des fabricants de laveurs-désinfecteurs et des fabricants d'instruments selon EN ISO 17664.

Pour un usage professionnel uniquement

Données techniques :

Poids spécifique à 20° C : 1,1 g/cm³

Domaine pH (déterminé en eau déminéralisée, 20° C) 0,2 – 0,4 ml/l : 4,0 - 3,7

Viscosité (concentré, 20° C) : < 50 mPas

Composants :

Composants selon la réglementation européenne sur les détergents 648/2004 :

< 5 % phosphonate, 15 - 30 % tensioactifs non ioniques

Agents de conservation (Methylchloroisoithiazolinone/Methylisothiazolinone)

Marquage CE :


neodisher MediKlar Dental est conforme au décret No. 95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux et à la directive européenne 93/42/CEE.

Toxicologie

neodisher MediKlar Dental est classé comme non toxique (expertise en appui à la norme européenne EN 30993-1 : évaluation biologique des dispositifs médicaux). Un résumé de l'estimation de risque est fourni sur demande.

Stockage :

A l'abri du gel. Conserver à température entre 0 et 30°C.

Valable 3 ans dans les conditions de stockage indiquées. Utilisable jusque : voir sur l'étiquette après le symbole 

Indications de risques et consignes de sécurité :

neodisher MediKlar Dental n'est pas un produit classé dangereux selon les critères du décret des matières dangereuses et des directives européennes.

Vous trouverez des informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité de la CEE.

Celles-ci sont disponibles sur : www.drweigert.fr - rubrique « service ».

FT 4776/2-2

01/11

