

neodisher® MediKlar special

Naspoelmiddel voor machinale reiniging van thermostabiele en thermolabele instrumenten en daarnaast ook geschikt voor bedden- en karrenwasmachines - Vloeibaar concentraat -



Belangrijkste toepassingsgebied:

Naspoelmiddel voor machinale reiniging van thermostabiele en thermolabele instrumenten en daarnaast ook geschikt voor bedden- en karrenwasmachines.

Eigenschappen:

neodisher MediKlar special

- Geschikt voor metalen oppervlakken, porselein en moeilijk te bevochtigen kunststoffen.
- Verkort de droogtijd aanzienlijk.
- Neutraliseert tevens eventuele versleping van alkalische resten
- Beperkt de vorming van vlekken, bij gebruik van gedemineraliseerd water.

Anesthesie accessoires en alle overage materialen gemaakt van polysulphon (PSU) en of polyphenyleen sulphon (PPSU) kunnen "stress cracks" vormen bij gebruik van naspoelmiddelen. Deze materialen dienen vooraf getest te worden.

Dosering en gebruik:

neodisher MediKlar special is bedoeld voor gebruik in reinigings- en desinfectiemachines en decontaminatie systemen. De dosering is afhankelijk van de toepassing, de te reinigen artikelen en de waterkwaliteit. De volgende parameters dienen in acht genomen te worden:

- Voor het naspoelen van chirurgische instrumenten, narcoseapparatuur, sterilisatiecontainers, implantaten en zuigflessen : 0.2 - 0.4 ml/l
- Voor het naspoelen van bedframes en karren: 0.2 - 0.8 ml/l

De neodisher MediKlar special gebruikoplossing moet geheel met water afgespoeld worden, bij voorkeur met gedemineraliseerd water. Dit om water vlekken te voorkomen.

De reinigings- en desinfectiemachines, decontaminatie systemen en doseersystemen moeten geschikt zijn voor het gebruik van neodisher MediKlar special.

Vóór eerste gebruik het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Niet vermengen met andere producten.

Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de te reinigen voorwerpen zoals aangegeven in de DIN en ISO 17664 norm.

Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de reinigingsmachine.

Alleen voor professioneel gebruik!

Product gegevens:

Soortelijkgewicht: 1.05 g/cm³ (20 °C)
pH-waarde (in gedemineraliseerd water, 20 °C) 0.2 - 0.8 ml/l: 4.0 - 3.5
Viscositeit (concentraat, 20 °C): < 50 mPa s

Werkzame stoffen:

Ingredients according to Regulation (EC) No 648/2004 on detergents:
< 5 % fosfonaten, 15 - 30 % non-ionische surfactanten, also preservation agents (methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone)

CE-markering:

Ja, neodisher MediKlar special voldoet aan de richtlijn 93/42/EWG voor medische producten



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14, 9404 RK Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven. Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl

neodisher® MediKlar special


Naspoelmiddel voor machinale reiniging van thermostabiele en thermolabiele instrumenten en daarnaast ook geschikt voor bedden- en karrenwasmachines - Vloeibaar concentraat -



Hantering en opslag:

Vorstvrij bewaren, altijd bij een temperatuur tussen de 0 en 30 °C.

Houdbaarheid bij correcte opslag: 36 maanden.

Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de stempel op het etiket achter het zandloper symbool .

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

neodisher MediKlar special is geen gevaargoed volgens de EU richtlijn 1999/45 EC, geldend voor het geconcentreerde product.

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden.

Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13).

Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 4073 NL/2-1
12/11



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14 9404 RK Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl