

neodisher® N

Zuur reinigings-/ neutralisatiemiddel
Vloeibaar concentraat



Belangrijkste toepassingsgebied:

Neutralisatie van alkalische residuen na het machinale reinigingsproces van

- Chirurgisch instrumentarium, anesthesietoebereiden, containers, OK-klompen, babyflessen en overige medisch-technische toebehoren.
- Laboratoriumglaswerk

Eigenschappen:

Zure (voor)reiniging van:

- Laboratoriumglaswerk (medisch en industrieel)
- Dierkooien

Zuur reinigings-/ neutralisatiemiddel, vrij van tensiden. neodisher N verwijdert verkleuringen en in zuur oplosbare verontreinigingen zoals kalk en urinesteen. Zeer goed afspoelbaar.

neodisher N is geschikt voor glas, keramisch materiaal, rvs, rubber en zuurbestendige kunststoffen. neodisher N is niet geschikt voor non-ferro materialen, verchromd en vernikkeld materiaal en geëloxeerd aluminium.

Dosering en gebruik:

neodisher N is geschikt voor gebruik in reinigings- /desinfectiemachines als neutralisatiemiddel voor instrumenten als ook voor de (voor)reiniging van laboratoriumglaswerk en dierkooien.

Houd rekening met de volgende parameters bij het gebruik van neodisher N:

Neutralisatie: 1–2 ml/l bij de eerste naspoeling na de reinigingsfase.

Zure (voor)reiniging van laboratoriumglaswerk: 2–4 ml/l bij 40–60 °C

Machinale reiniging van dierkooien: 3–4 ml/l bij 60–80 °C

Maak voor het doseren gebruik van voor neodisher N geschikte doseerapparatuur.

Om watervlekken te voorkomen is het gebruik van demi-water in de laatste spoeling aan te bevelen.

De neodisher N gebruiks-oplossing moet volledig met water afgespoeld worden (bij voorkeur met demi-water).

De machine, de te reinigen materialen en de afvoerleidingen dienen zuurbestendig te zijn. Afvoerleidingen van eterniet en gietijzer zijn ongeschikt (in dat geval is neutralisatie van de gebruiksooplossing noodzakelijk).

Niet vermengen met andere producten. Na gebruik ander product het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Let ook op de aanwijzingen van de instrumenten fabrikant voor reinigen en desinfecteren volgens de DIN en ISO 17664 richtlijnen.

Let ook op de aanwijzingen van de fabrikant van de reinigings en desinfectiemachine.

Alleen voor professioneel gebruik!

Productgegevens:

Soortelijk gewicht: (20 °C): 1.5 g/cm³
pH-waarde (in demi water, 20 °C) 1 - 4 ml/l: 2.2 - 1.4
Viscositeit (concentraat, 20 °C): < 10 mPa s
Titratie factor: 0.16

Ingrediënten:

Samenstelling conform EG detergentenrichtlijn 648/2004:
> 30 % fosfaten



Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl

neodisher[®] N


Zuur reinigings-/ neutralisatiemiddel
Vloeibaar concentraat



CE-markering: CE

neodisher N voldoet aan de eisen van Richtlijn 93/42/EWG, bijlage I over medische producten.

Hantering en opslag:

Altijd bij een temperatuur tussen -15 en 30 °C.
Houdbaarheid bij correcte opslag: 48 maanden.
Voor de vervaldatum wordt verwezen naar de stempel op het etiket achter het zandloper symbool .

Hazard and precautionary statements:

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13). Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

MB 4201 GB/2-5
Versie: 10-2014
Vervangt: 13-09-2011



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.
Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl