



V-Print splint

Indikationen / Indications

Therapeutische Schienen / Therapeutic splints

Hilfs- und Funktionsteile die Diagnose betreffend / Auxiliary parts and functional parts for diagnostics

Bleaching-Schienen (Home-Bleaching) / Bleaching splints (home bleaching)

Druckerhersteller / manufacturer	3D-Druck / 3D printing			Reinigung / Washing		Nachbelichtung / Postcuring	
	Gerät / Device	Schicht / Layer* [µm]	Build Style*	Gerät / Device	Programm / Program	Gerät / Device	Programm / Program
VOCO	SolFlex 170 [SMP], SolFlex 350 [SMP], SolFlex 650 [SMP], SolFlex 170 HD	50	Dental Gentle	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
W2P	SolFlex 170 [Plus] SolFlex 350 [Plus] SolFlex 650 [Plus] SolFlex 163 FullHD	50	Dental Gentle	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
ASIGA	MAX UV PRO 4K	50	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
Rapid Shape	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				RS Wash	V-Print splint	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
DMG	3Delite 3Demax	100	x	Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	RS Cure / RS Cure US	V-Print splint
				Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
SHERA	SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40 SHERAprint 20+ SHERAprint 30+ SHERAprint 50+	100	x	DMG 3Dewash	V-Print splint	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
Straumann	P20 II P30 II P40 II P10+ P20+ P30+ P50+	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	3Decure	V-Print splint
				P wash	V-Print splint	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
Dentalwings	D20 II D30 II D40 II D10+ D20+ D30+ D50+	100	x	Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
				Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
Microlay	Versus	100	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.
Ackuretta	SOL	50	x	Ultraschall / Ultra sonic	3 min. / 2 min.	OtoFlash G171	2 × 2000 flashes
				Rührbad / stirring bath	3 min. / 2 min.	Next Dent LC Box	1 × 30 min.

x = Nicht anwendbar / not applicable *empfohlene/r Schichtstärke/Build Style / recommended layer thickness/build style

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Phone +49 (4721) 719-0
Fax +49 (4721) 719-140
e-mail: marketing@voco.com
www.voco.dental

