
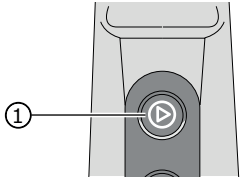
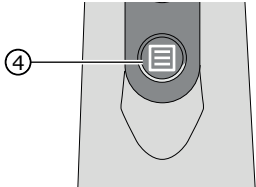
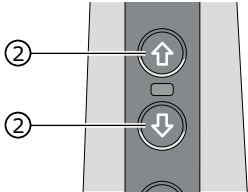
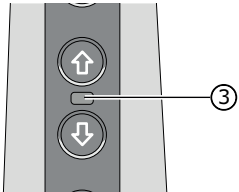


Kurzbedienungsanweisung - DIAGNOcam Vision Full HD



DIAGNOcam Vision Full HD		
Installation / Programmstart		► Für Installation und Programmstart die Gebrauchsanweisung und Installationsanweisung der verwendeten Software beachten.
Kamera einschalten		Die Kamera kann durch folgende Möglichkeiten eingeschaltet werden: <ul style="list-style-type: none"> • beim Systemstart der bildgebenden Software • eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld drücken • aus der Tischablage oder Wandhalterung entnehmen
Bildaufnahme Video starten / stoppen		► Auslöse-Taste ① drücken, um ein Bild aufzunehmen oder eine Videoaufnahme zu starten / zu stoppen.
Modus wechseln		► Menü-Taste ④ drücken, um zwischen den Modi (Intraoral, Fluoreszenz und Transillumination) zu wechseln.
Navigation im Zahnschema		► Navigationstasten ② drücken, um im Zahnschema zu navigieren (sofern in der Software vorhanden).
Status LED		Status LED ③ zeigt den aktuellen Status der Kamera: <ul style="list-style-type: none"> • Weiß = Kamera ist aktiv • Blau = Standby-Modus • Rot = Fehler
Kamera ausschalten		Die Kamera kann durch folgende Möglichkeiten abgeschaltet werden: <ul style="list-style-type: none"> • Ablegen in die Tischablage oder Wandhalterung • Längere Zeit ohne Benutzung

Kurzbedienungsanweisung - DIAGNOcam Vision Full HD



Einwegschutzhülle verwenden		
Einwegschutzhülle aufziehen		▶ Einwegschutzhülle langsam über die Kamera ziehen, damit die Luft besser entweichen kann.
		▶ Äußeres Schutzpapier abziehen.
		▶ Das Klarsichtfenster vor dem Aufnahme Fenster der Kamera straffen. ▶ Das Klarsichtfenster der Einwegschutzhülle muss genau über dem Aufnahme Fenster der Kamera liegen.
Einwegschutzhülle abziehen		▶ Einwegschutzhülle nach jeder Behandlung vorsichtig von der Kamera abnehmen und entsorgen.
Tip einrasten und lösen		
Tip einrasten		▶ Tip einseitig an Gehäuse einhängen und gegenüberliegende Seite vorsichtig einrasten. ▶ Tip auf sicheren Halt prüfen.
Tip lösen		▶ Tip durch einseitige Drehbewegung vorsichtig lösen, dabei den Tip an der vorgesehenen Aussparung abdrücken und nicht an den weichen Silikonbeinen halten. ▶ Tip nach jeder Anwendung gemäß Gebrauchsanweisung aufbereiten.
Fluorescence Cover aufstecken und abziehen		
Fluorescence Cover aufstecken		▶ Fluorescence Cover auf Kamera aufstecken. ▶ Fluorescence Cover auf sicheren Halt prüfen.
Fluorescence Cover abziehen		▶ Fluorescence Cover vorsichtig abziehen. ▶ Fluorescence Cover nach jeder Anwendung gemäß Gebrauchsanweisung aufbereiten.