
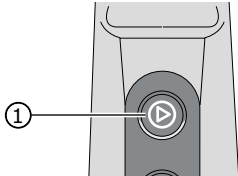
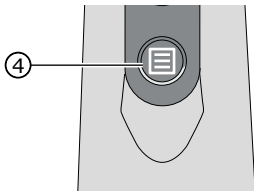
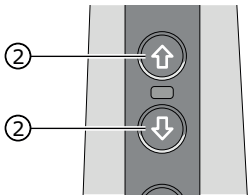
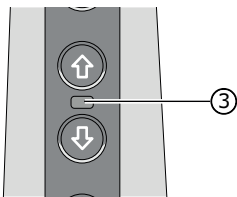


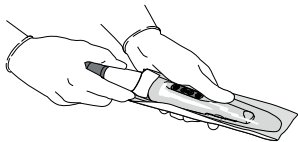
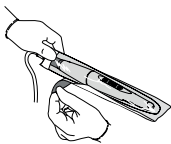
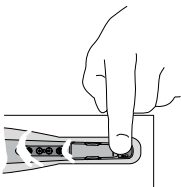
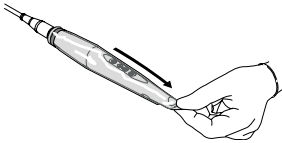
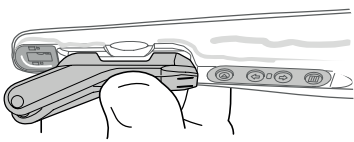
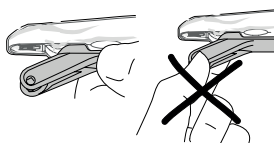
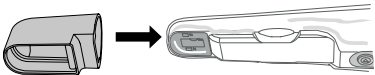

Instructions d'utilisation en bref - DIAGNOcam Vision Full HD



DIAGNOcam Vision Full HD		
Installation/Démarrage du programme		► Respecter le mode d'emploi et les instructions d'installations du logiciel utilisé pour l'installation et le démarrage du programme.
Activation de la caméra		La caméra peut être activée de diverses manières : <ul style="list-style-type: none"> • par un démarrage système du logiciel d'imagerie • par la pression d'une touche quelconque du panneau de commande • par son retrait du plateau de table ou du support mural
Capture d'image Démarrage/Arrêt de la vidéo		► Appuyer sur la touche de déclenchement ① pour prendre une photo ou démarrer/arrêter une vidéo.
Changement de mode		► Appuyer sur la touche menu ④ pour changer de mode (intraoral, fluorescence ou transillumination).
Navigation dans le schéma dentaire		► Appuyer sur les touches de navigation ② pour naviguer dans le schéma dentaire (si disponible dans le logiciel).
LED d'état		La LED d'état ③ indique l'état actuel de la caméra : <ul style="list-style-type: none"> • Blanc = la caméra est active • Bleu = mode veille • Rouge = erreur
Arrêt de la caméra		La caméra peut être éteinte de diverses manières : <ul style="list-style-type: none"> • sa dépose sur le plateau de table ou le support mural • un long moment sans utilisation

Instructions d'utilisation en bref - DIAGNOcam Vision Full HD



Utilisation d'une housse de protection jetable		
Positionnement de la housse de protection jetable		▶ Enfiler lentement la housse de protection à usage unique sur la caméra afin de mieux laisser l'air s'échapper.
		▶ Retirer le papier extérieur de protection.
		▶ Tendre la fenêtre anti-buée devant la fenêtre d'exposition de la caméra. ▶ La fenêtre anti-buée de la housse de protection à usage unique doit précisément se placer sur la fenêtre d'exposition de la caméra.
Retrait de la housse de protection jetable		▶ Retirer avec précaution la housse de protection jetable de la caméra et l'éliminer.
Insertion et retrait de la pointe		
Insertion de la pointe		▶ Accrocher un côté de la pointe sur le boîtier et enclencher l'autre côté avec précaution sur le côté opposé. ▶ Contrôler la bonne fixation de la pointe.
Retrait de la pointe		▶ Pour desserrer la pointe avec précaution, la tourner d'un côté, l'enfoncer dans l'évidement prévu et ne pas la tenir au niveau des pattes souples en silicone. ▶ Procéder au nettoyage de la pointe après chaque utilisation, conformément au mode d'emploi.
Insertion et retrait du cache de fluorescence		
Insertion du cache de fluorescence		▶ Insérer le cache de fluorescence sur la caméra. ▶ Contrôler la bonne fixation du cache de fluorescence.
Retrait du cache de fluorescence		▶ Retirer avec précaution le cache de fluorescence. ▶ Procéder au nettoyage du cache de fluorescence après chaque utilisation, conformément au mode d'emploi.