

# Produktinformation

## FD 360 Kunstlederreinigung und -pflege



### FD 360 auf einen Blick

- Reinigungsfluid für die porentiefe Reinigung und Pflege von Kunstlederoberflächen.
- Intensive Reinigungswirkung – entfernt Flecken aller Art, Ränder und Verfärbungen.
- Sehr gute Materialverträglichkeit – geeignet für alle Kunstlederbezüge.
- Umweltverträgliche, treibgasfreie Sprühflasche.
- Set mit 500 ml-Sprühflasche, 9 Spezialschwämmen und 1 Spezialtuch.

### Eigenschaften

FD 360 aus der Dürr System-Hygiene reinigt und pflegt alle Stuhlbezüge aus Kunstleder und trägt damit wesentlich zur Werterhaltung der Behandlungsstühle und anderer Kunstlederbezüge bei. Die gleichzeitige Verwendung von FD 360 und dem Spezialtuch reinigt und pflegt Kunstlederoberflächen. Mit dem Spezialschwamm werden auch schwer entfernbare Verschmutzungen, Flecken oder Verfärbungen, z.B. durch nicht fixierte Farbstoffe der Kleidung, schnell und porentief entfernt. FD 360 pflegt und reinigt intensiv und rückstandsfrei; seidig glänzend.

### Produktzusammensetzung

FD 360 wirkt auf Basis einer Mischung von Spezialtensiden, Silikonverbindungen und Pflegekomponenten auf Avocadoölbasis.

### Anwendung

FD 360 Reinigungsfluid unverdünnt anwenden. FD 360 auf die zu reinigenden Flächen sprühen und sofort mit dem Spezialtuch wischen oder zur Intensivreinigung FD 360 mit dem Spezialschwamm verreiben. Dies bewirkt eine noch gründlichere, porentiefe Reinigung. Durch die Kombination von FD 360 mit dem Spezialschwamm werden auch hartnäckige Flecken und Verfärbungen von den Stuhlbezügen entfernt. Anschließend überschüssiges FD 360 mit trockenem Tuch abwischen. FD 360 bei Bedarf täglich anwenden.

### Umweltverhalten

Die Verpackung ist aus Polyethylen und Polypropylen und somit stofflich und thermisch verwertbar. Für Recycling Flasche mit Wasser ausspülen.

Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

### Physikalische Daten

Aussehen: milchig, weiße Flüssigkeit

Dichte:  $D = 0,99 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$  (20 °C)

pH-Wert:  $3,6 \pm 0,5$

### Haltbarkeit

3 Jahre

# Produktinformation

## FD 360 Kunstlederreinigung und -pflege

### Packungsgröße

Set mit 500 ml-Sprühflasche, 9 Spezialschwämmen und 1 Spezialtuch im Karton.

### Lagerung

Präparat zwischen 5 °C und max. Raumtemperatur lagern.

### Allgemeine Hinweise

FD 360 kann problemlos für alle Kunstlederoberflächen verwendet werden. Bei anderen Oberflächen wie z.B. Leder muss die Materialverträglichkeit an einer verdeckten Oberfläche geprüft werden. Herstellerangaben der Behandlungseinheit beachten. Für Leder dürfen die Spezialschwämme nicht verwendet werden. FD 360 nicht mit anderen Produkten mischen. Es kann zu Abweichungen von Produktfarbe/Geruch kommen, insbesondere bei der Lagerung im Sonnenlicht. Diese Farb- bzw. Geruchsveränderung hat jedoch keinen Einfluss auf die Reinigungsleistung des Produktes. Anwendung ausschließlich durch Fachpersonal. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse sind umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats zu melden.

### Gefahrenhinweise

FD 360 ist nach CLP-Verordnung eingestuft und nicht kennzeichnungspflichtig.



### Vertrieb

Dürr Dental SE  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)  
[info@duerrdental.com](mailto:info@duerrdental.com)

### Hersteller

orochemie GmbH + Co. KG  
Max-Planck-Straße 27  
70806 Kornwestheim  
Germany  
[www.orochemie.de](http://www.orochemie.de)  
[info@orochemie.de](mailto:info@orochemie.de)