

Mit 3 pickenden Bewegungen bereiten sie die ersten 2/3 des Kanals auf Überprüfen sie die Durchgängigkeit des Wurzelkanals mit einer ISO 10 oder Iso 15 Handfeile und bestimmen sie mit einen Apex Locater die Arbeitslänge Reinigen sie bitte das Instrument im Interim-Stand und Spülen sie den Wurzelkanal Bereiten sie den Wurzelkanal mit der Flash Feile vollständig auf. Wenn das Instrument nicht auf AL vordringt, wiederholen Sie Schritt 2 und 3





YOUR **NEW** POWER

Flat Design erhöht die Effizienz

ermöglicht eine hervorragende Entfernung von Debris

Sorgt für optimale Schneideleistung,
 Flexibilität und mechanische Reinigung
 Nicht aktive Spitze für sicherere
 Präparationen

Minimal invasiv

Doppelte NiTi-Behandlung