

# VITA ADIVA® LUTING SOLUTIONS

La solution de collage spécifique au matériau - un procédé simple, intuitif et sûr !



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 07.19

VITA – perfect match.


**VITA**

## Description du produit

Les VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS sont des solutions de collage parfaitement adaptées aux matériaux VITA pour le collage des restaurations en céramique feldspathique, hybride et vitreuse, en dioxyde de zirconium, en composite et en métal. Les adhésifs intégrés et spécifiques au matériau assurent une adhérence fiable. Conçu de façon claire et simple, ce système intelligent vous aide à réaliser un collage

sûr et efficace grâce à une manipulation simple et intuitive. Le coffret pratique sous forme de plateau normalisé vous permet, à vous et à votre équipe, d'avoir toujours tous les composants à portée de main. Les solutions de collage VITA ADIVA sont bien sûr aussi adaptées aux matériaux de restauration d'autres fabricants.

## APERÇU DE TOUTES LES SOLUTIONS

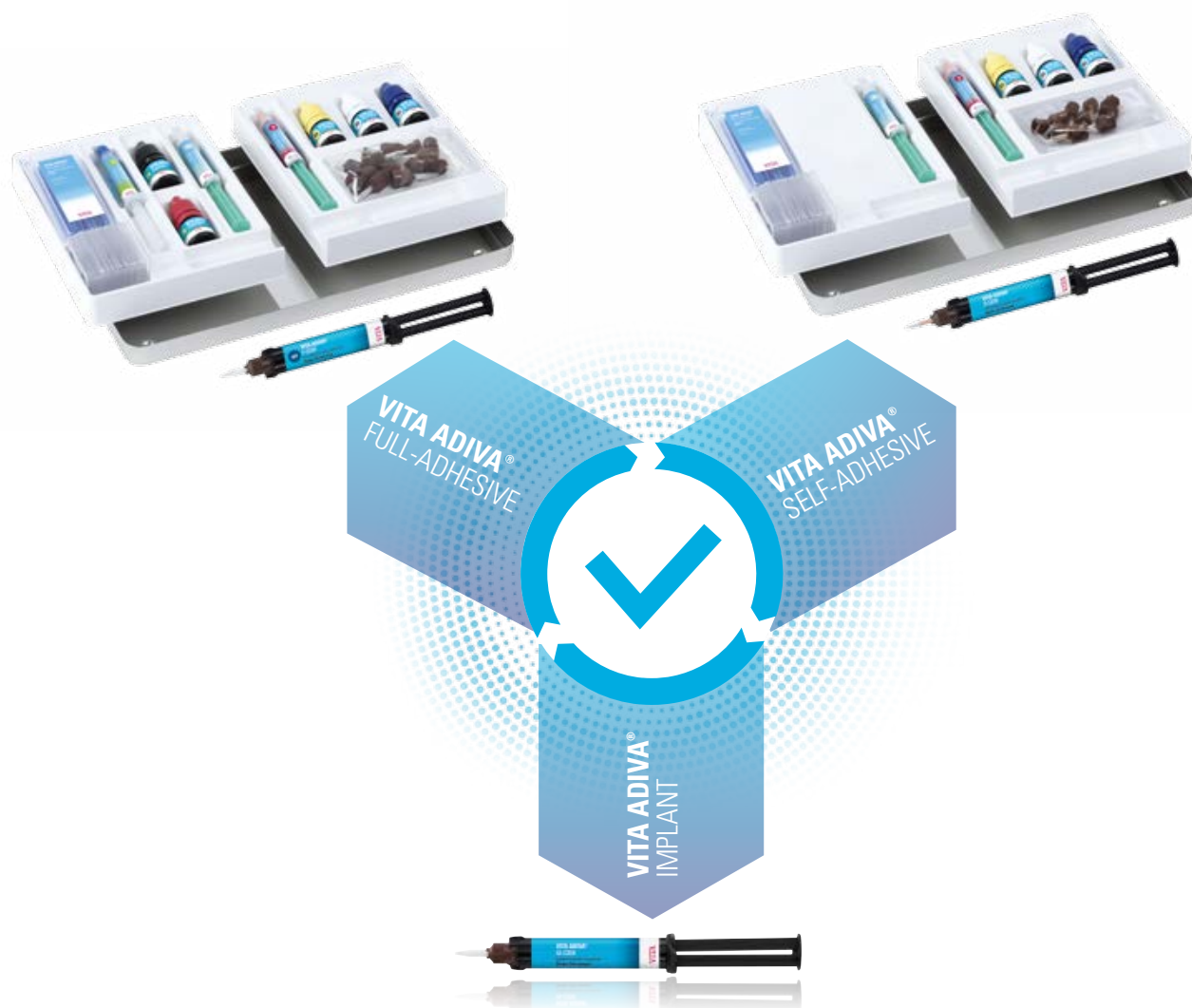

### VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE

- Un système de scellement adhésif avec des composants parfaitement adaptés destiné au conditionnement de la substance dentaire et du matériau de restauration.
- Le composite de scellement adhésif à double mode de polymérisation VITA ADIVA F-CEM est proposé en quatre couleurs (A2 Universal, A3, White opaque, Translucent).

### VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE

- Un système de scellement autoadhésif avec des composants parfaitement adaptés destiné au conditionnement du matériau de restauration.
- Le composite de scellement autoadhésif à double mode de polymérisation VITA ADIVA S-CEM est proposé en deux couleurs (A2 Universal, Translucent).

### VITA ADIVA® IMPLANT

- VITA ADIVA IA-CEM est un composite de scellement bi-polymérisant ultra-opaque pour le collage de couronnes sur bases en titane et de piliers individuels en titane.

### VITA ADIVA® TEMPORARY

- VITA ADIVA TE-CEM est une résine de scellement à double mode de polymérisation destinée au scellement temporaire. Elle est proposée dans la couleur Translucent.

\*) VITA ADIVA S-CEM n'est pas certifié par la FDA.

## AVANTAGES



### Fiabilité

- Coller fiablement des matériaux de restauration multiples avec des adhésifs spécifiquement adaptés aux matériaux.

### Sécurité du procédé

- Un procédé de collage sûr grâce à des coffrets de collage clairs, avec des composants organisés de façon systématique et codés par couleur.

### Rationalité

- Ce coffret pratique en deux parties et sous forme de plateau normalisé permet d'avoir tous les composants toujours à portée de main.

# VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING SET



## VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING SET Code art. FAFAS

Désignation	Contenu	Conditionnement	Code art.*
VITA ADIVA TOOTH-ETCH**	3 ml	Seringue + 15 embouts applicateurs, bleu	–
VITA ADIVA T-BOND I + II	5 ml	Flacon, 2 x	FATBS
VITA ADIVA CERA-ETCH**	3 ml	Seringue + 20 embouts applicateurs, rouge	FACE3
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Flacon	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Flacon	FAZRP5
VITA ADIVA M-PRIME	5 ml	Flacon	FAMP5
VITA ADIVA F-CEM, couleur : A2 Universal	5 ml	Seringue + 15 embouts mélangeurs T-Mixer 1:1, marron	FAFCEMA25
VITA ADIVA OXY-PREVENT	3 ml	Seringue + 10 embouts applicateurs, vert	FAOP3
VITA ADIVA ACCESSORIES : VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

## VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING VERSIONS

Désignation	Contenu	Conditionnement	Code art.*
VITA ADIVA F-CEM, couleur : A2 Universal	5 ml	Seringue + 15 embouts mélangeurs T-Mixer 1:1, marron	FAFCEMA25
VITA ADIVA F-CEM, couleur : A3	5 ml	Seringue + 15 embouts mélangeurs T-Mixer 1:1, marron	FAFCEMA35
VITA ADIVA F-CEM, couleur : White opaque	5 ml	Seringue + 15 embouts mélangeurs T-Mixer 1:1, marron	FAFCEMW05
VITA ADIVA F-CEM, couleur : Translucent	5 ml	Seringue + 15 embouts mélangeurs T-Mixer 1:1, marron	FAFCEMT5


## VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE ACCESSORIES

Désignation	Contenu	Code art.*
VITA ADIVA Microbrush	25 unités	FAMB25
VITA ADIVA Mixing-Trays	25 unités	FAAT25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1	15 unités	FATM11

\*) Tous les composants VITA ADIVA peuvent être commandés individuellement, y compris en réassort, au moyen du code d'article indiqué.

\*\*) Précision : les recharges pour VITA ADIVA TOOTH-ETCH : 2 seringues de 3 ml (code d'article FATE3) ; VITA ADIVA CERA-ETCH peuvent aussi être commandées en flacons de 6 ml (code d'article FACE6).

## VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING SET

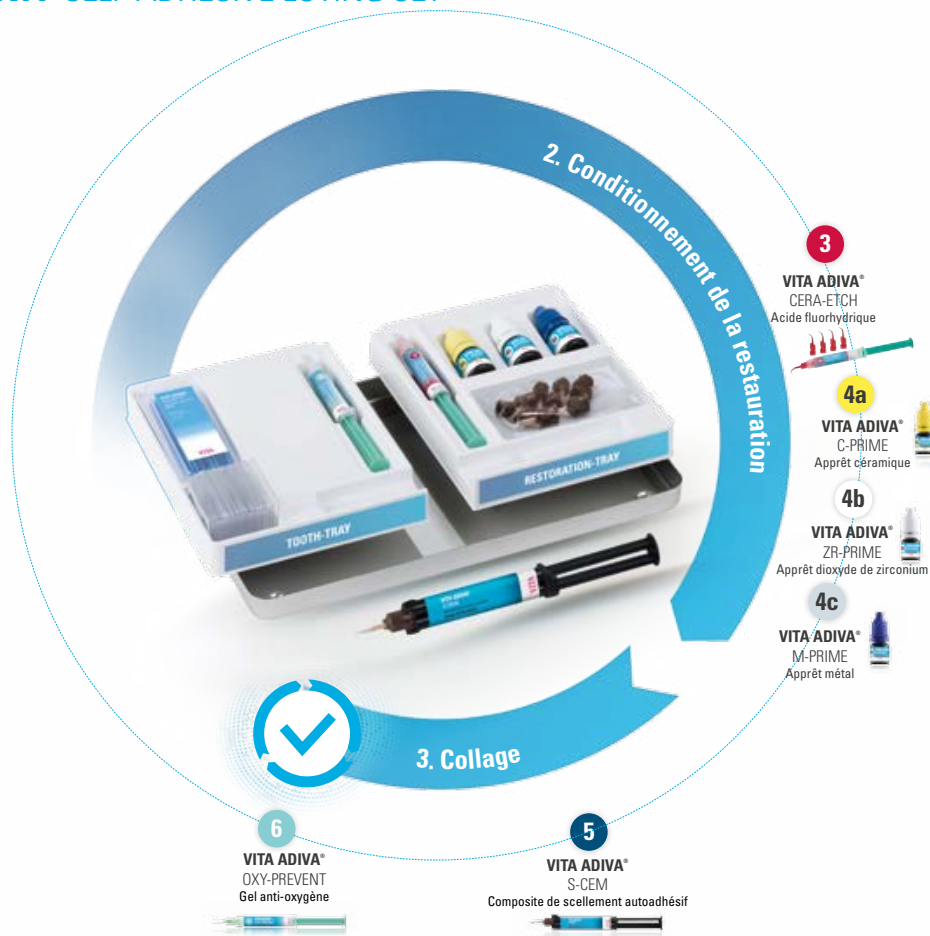

### VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING SET Code art. FASAS

Désignation	Contenu	Conditionnement	Code art.*
VITA ADIVA CERA-ETCH**	3 ml	Seringue + 20 embouts applicateurs, rouge	FACE3
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Flacon	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Flacon	FAZRP5
VITA ADIVA M-PRIME	5 ml	Flacon	FAMP5
VITA ADIVA S-CEM, couleur : A2 Universal	5 ml	Seringue + 15 embouts mélangeurs T-Mixer 4:1, marron	FASCEMA25
VITA ADIVA OXY-PREVENT	3 ml	Seringue + 10 embouts applicateurs, vert	FAOP3
VITA ADIVA ACCESSORIES : VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

### VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING VERSIONS

Désignation	Contenu	Conditionnement	Code art.*
VITA ADIVA S-CEM, couleur : A2 Universal	5 ml	Seringue + 15 embouts mélangeurs T-Mixer 4:1, marron	FASCEMA25
VITA ADIVA S-CEM, couleur : Translucent	5 ml	Seringue + 15 embouts mélangeurs T-Mixer 4:1, marron	FASCENT5

### VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE ACCESSORIES

Désignation	Contenu	Code art.*
VITA ADIVA Microbrush	25 unités	FAMB25
VITA ADIVA Mixing-Trays	25 unités	FAAT25
VITA ADIVA T-Mixer 4:1	15 unités	FATM41

\*) Tous les composants VITA ADIVA peuvent être commandés individuellement, y compris en réassort, au moyen du code d'article indiqué.

\*\*) Précision : VITA ADIVA CERA-ETCH peut aussi être commandé en flacons de 6 ml (n° art. FACE6).

## VITA ADIVA® IA-CEM et TE-CEM



### VITA ADIVA® IA-CEM SET N° art. FAIACEMSET

Désignation	Contenu	Conditionnement	Code art.*
VITA ADIVA IA-CEM, couleur : ultra-opaque	5 ml	Seringue + 15 embouts mélangeurs T-Mixer 1:1, marron	FAIACEMU05
VITA ADIVA CERA-ETCH	6 ml	Flacon	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Flacon	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Flacon	FAZRP5
Accessoires VITA ADIVA IA-CEM : VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

### ACCESSOIRES VITA ADIVA® IA-CEM


Désignation	Unités	Code art.*
VITA ADIVA T-Mixer 1:1	15 pièces	FATM11
VITA ADIVA Microbrush	25 pièces	FAMB25
VITA ADIVA Mixing-Trays	25 pièces	FAAT25

### VITA ADIVA® TE-CEM

Désignation	Contenu	Conditionnement	N° art.
VITA ADIVA TE-CEM, Translucent	5 ml	Seringue + 15 embouts mélangeurs T-Mixer 4:1, marron	FATECEM5

\*) Tous les composants VITA ADIVA peuvent être commandés individuellement, y compris en réassort, au moyen du code d'article indiqué.

## LES COULEURS ET LES VARIANTES

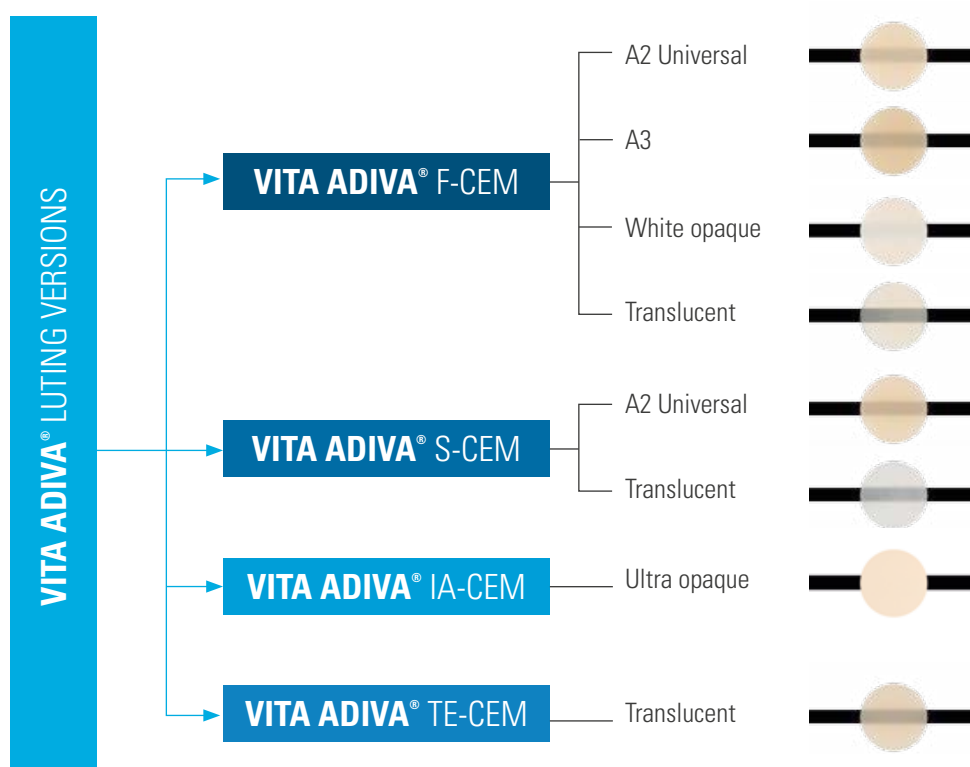







## RECOMMANDATION POUR LE COLLAGE SPÉCIFIQUE AU MATÉRIAU

Matériau CFAO VITA	Catégorie de matériau	Type/composite de collage				
		adhésif	autoadhésif	adhésif	classique	temporaire
		VITA ADIVA® F-CEM	VITA ADIVA® S-CEM	VITA ADIVA® IA-CEM		VITA ADIVA® TE-CEM
VITABLOCS	Céramique feldspathique	●	● <sup>1</sup>	○	X	X
VITA ENAMIC	Céramique hybride	●	● <sup>1</sup>	●	X	X
VITA SUPRINITY PC	Céramique de silicate de lithium dopée au dioxyde de zirconium	●	●	●	○ <sup>2</sup>	X
VITA YZ T	Dioxyde de zirconium	●	●	●	●	●
VITA YZ HT	Dioxyde de zirconium	●	●	●	●	●
VITA YZ ST	Dioxyde de zirconium	●	●	●	●	●
VITA YZ XT	Dioxyde de zirconium	●	●	●	●	●
VITA CAD-Temp	Résine composite	○	X	●	○	●
-	Alliage précieux, non-précieux, titane	●	●	●	●	●

● conseillé ○ possible X impossible

## TABLEAU DES INDICATIONS

	VITA ADIVA® F-CEM	VITA ADIVA® S-CEM	VITA ADIVA® IA-CEM	VITA ADIVA® TE-CEM
	adhésif composite de collage	autoadhésif composite de collage	composite de collage adhésif	temporaire composite de collage
	●	●	●	●
	●	X	X	X
	●	X	X	X
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●


● conseillé X impossible

### Observations

<sup>1</sup>) Les composites de collage autoadhésifs s'utilisent exclusivement pour les couronnes lorsqu'il s'agit de céramique silicatée et hybride.

<sup>2</sup>) Les matériaux de scellement classiques (par ex. Ketac CEM, 3M ESPE, Vivaglass CEM, Ivoclar Vivadent, GC Fuji I, GC Dental) s'utilisent exclusivement pour des couronnes sur moignons dentaires naturels. Pour un scellement classique, la préparation doit être dotée de surfaces rétentes et réduite selon les directives de préparation à une forme anatomique en conservant les épaisseurs de paroi minimales indiquées.

Vous trouverez de plus amples informations sur les VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS sur le site [www.vita-zahnfabrik.com/adiva](http://www.vita-zahnfabrik.com/adiva)

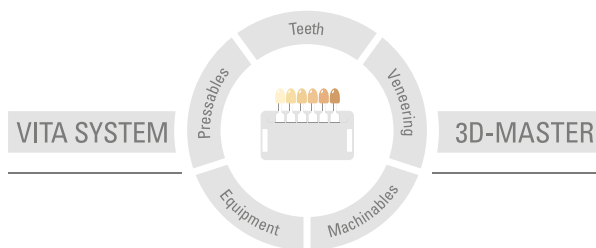

**N.B.** Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrectes. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition : 07.19

Cette nouvelle édition de notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik est certifiée et les produits suivants portent le marquage :  
CE 0482

**VITA ADIVA®** F-CEM, **VITA ADIVA®** S-CEM, **VITA ADIVA®** IA-CEM, **VITA ADIVA®** TE-CEM, **VITA ADIVA®** TOOTH-ETCH, **VITA ADIVA®** T-BOND I + II, **VITA ADIVA®** C-PRIME, **VITA ADIVA®** ZR-PRIME, **VITA ADIVA®** M-PRIME

La société Harvard Dental International GmbH est certifiée selon la directive sur les dispositifs médicaux et les produits suivants portent le marquage :

CE  
**VITA ADIVA®** Microbrush®, **VITA ADIVA®** T-Mixer™

La société VITA Zahnfabrik est certifiée conformément à la directive sur les dispositifs médicaux et le produit suivant porte le marquage :

CE  
**VITA ADIVA®** OXY-PREVENT

Microbrush® est une marque de MICROBRUSH® INTERNATIONAL.  
T-Mixer™ est une marque de Sulzer Mixpac AG.

Les produits/systèmes d'autres fabricants cités dans ce document sont des marques déposées des fabricants respectifs.

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)